

外科 Surgical

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| ヒューフレディグループ製外科用 インスツルメント | H02 | 持針器 | H44 |
| チゼル (のみ) | H03 | マレット | H51 |
| 鋭匙 (ボーンキュレット) | H09 | オステオトーム | H52 |
| ペリオサージカルキュレット | H12 | 剥離子 (ペリオスチール) | H54 |
| サイナスキュレット | H13 | ペリオトーム (歯周靱帯刀) | H60 |
| エレベーター (ヘーベル) | H14 | リトラクター／開口器 | H62 |
| ルクセーティングエレベーター | H17 | 骨鉗子 | H66 |
| ルクセーティングハイブリッド | H19 | ルートチップエレベーター | H67 |
| 骨やすり | H21 | メスハンドル | H69 |
| やすり (ペリオドンタルファイル) | H22 | はさみ | H71 |
| 抜歯鉗子 | H23 | 外科用ピンセット (ティッシュプライヤー/撮子) | H78 |
| 移植用インスツルメント | H30 | ティッシュニッパー／タオルクランプ | H84 |
| ガーゼパッカー | H32 | ワイヤーカッピングシザーズ | H85 |
| 止血鉗子 | H33 | アスピレーター | H86 |
| サイナスリフトインスツルメント | H35 | シリンジ／ボーンキャリパス | H88 |
| ペリオナイフ | H37 | | |
| マウスギャグ (開口器) | H42 | | |
| マウスプロップ | H43 | | |



ヒューフレディグループ製外科用インスツルメント

ヒューフレディグループでは数多くの外科用インスツルメントのラインナップをご用意しています。その多くはキーオピニオンリーダー、教育者および教育関連施設のプロフェッショナルチームと共同開発の下にデザインされており、高水準の精度と性能を備えています。長年蓄積された製造技術に加え独自に開発した材料および徹底した品質管理システムにより、高水準を保ちより良い臨床結果を得られるように、日々貢献しております。

ブラックライン

- ・高性能な黒色コーティングが接触する粘膜の滑りを改善し、粘膜下においても明確な視野を確保。
- ・ライトの乱反射を抑制し、コントラストを明示。
- ・イミニティスチール製と比較して鋭利さと耐久性が向上。



抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

- ・把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持。^{※1}
- ・薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスクを低減し歯牙へのアクセスと視野が向上。
- ・ハンドルにホールパターンを採用したことにより従来品と比較して約35%軽量になり^{※2}、使用中の快適さとコントロールの良さを実現。
- ・マット仕上げのためライトの乱反射を抑制。

※1:ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウマとの比較
※2:ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較



持針器 パーマシャープ (Perma Sharp™)

- ・ダイヤモンドとほぼ同程度の硬度を有するタングステンカーバイドを貼り付けることで耐久性を向上。
- ・複数のラチェットが把持の圧力を適度に保ち、スムーズに解放(マシュー型・ヘガール型)。



● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

チゼル(のみ)
Chisels




外科 Surgical

Chisels

チゼル(のみ)

■ ペリオドンタルチゼル オッセンバイン


骨の形態修正に適しています。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。フラップの引き起こしや二次口蓋フラップの除去にも使用できます。

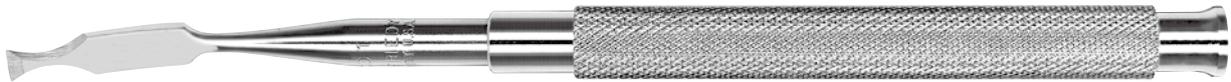

先端幅:5.0mm

● オッセンバイン 1
1 Ochsenshein

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|-------|-----|
| CO1 | 9,600 円 | #524 | 丸柄 | |

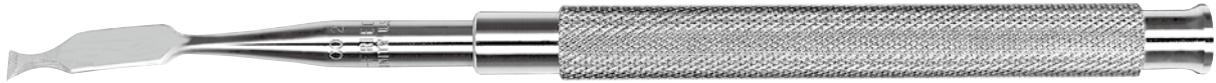

先端幅:5.0mm

● オッセンバイン 2
2 Ochsenshein

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|-------|-----|
| CO2 | 9,600 円 | #524 | 丸柄 | |



先端幅:2.5mm

先端幅:2.5mm

● オッセンバイン 3
3 Ochsenshein

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| CO36 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |



先端幅:3.8mm

先端幅:3.8mm

● オッセンバイン 4
4 Ochsenshein

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| CO46 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |

ハンドルの種類



#524 丸柄

マレットを使用できる片頭ハンドル



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

■ ペリオドンタルチゼル ロードス バック・アクション



● **ロードス バック・アクション 36/37**
36/37 Rhodes Back-Action

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------------|----------|--------|---------|-----|
| C36/379 | 10,700 円 | #9 | エパーエッジ | |
| C36/376 | 9,400 円 | #6 | サテンスチール | |

ロードス・バックアクション(C36/37)はプルストロークで使用します。歯牙に隣接した骨に過剰な損傷を与えずに除去することができます。特に最後臼歯の遠心面での使用に適しています。

■ ペリオドンタルチゼル クレイマー・ネビンス



クレイマー・ネビンス 1/2
1/2 Kramer-Nevis

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------------|---------|--------|---------|-----|
| CKN1/26 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

■ ペリオドンタルチゼル フェディ

歯肉の除去または豊隆形成のための切開に使用、また隣接部の組織除去にも適用です。



フェディ 1
1 Fedi

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------------|----------|--------|---------|-----|
| CPF16 | 11,000 円 | #6 | サテンスチール | |



フェディ 2
2 Fedi

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------------|----------|--------|---------|-----|
| CPF26 | 11,000 円 | #6 | サテンスチール | |

■ ペリオドンタルチゼル



TG
TG

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|
| CTG6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |

掲載画像 CTG-O6



● **TG-O**
TG-O

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------------|---------|--------|---------|-----|
| CTG-O6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |
| CTG-O | 9,600 円 | #2 | 角柄 | |

TGにオッセンバインのカットアウトを付与した変形版です。

ハンドルの種類



#9 エパーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エパーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#2 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ペリオドンタルチゼルアーバン



先端幅:7.0mm

先端幅:7.0mm

| アーバン 1 Urban Bone Chisel | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CURBAN1 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |



先端幅:1.0mm

先端幅:1.3mm

| アーバン 2 Urban Bone Contouring | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CURBAN2 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

■ ペリオドンタルチゼル ジョバノビック



先端幅:4mm

先端幅:4mm

| ● ジョバノビック 1 4mm 1 Jovanovic 13K/TG | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| PJO/16 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |



先端幅:5mm

先端幅:5mm

| ジョバノビック 2 5mm 2 Jovanovic 13K/TG | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| PJO/26 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |



先端幅:6mm

先端幅:6mm

| ジョバノビック 3 6mm 3 Jovanovic 13K/TG | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| PJO/36 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |



先端幅:2mm

先端幅:2mm

| ジョバノビック ミニ 2 2 Jovanovic Mini | | | | |
|----------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| PJO/2M6 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |



先端幅:3mm

先端幅:3mm

| ジョバノビック ミニ 3 3 Jovanovic Mini | | | | |
|----------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| PJO/3M6 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。
軽い力で把持することができるためのハンドル。

■ ペリオドンタルチゼル ブーザー



| ブーザー 1/2 | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| 1/2 Buser Modified Bone Scraper | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| PPBUSER12X | 12,400 円 | BL | ブラックライン | |
| PPBUSE1/26 | 11,000 円 | #6 | サテンスチール | |

J01/2および13K/13KLの変形版です。



| ブーザー 1/3 | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| 1/3 Buser Modified Bone Scraper | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| PPBUSER13X | 12,400 円 | BL | ブラックライン | |
| PPBUSE1/36 | 11,000 円 | #6 | サテンスチール | |

J01/3および13K/13KLの変形版です。



| ブーザー 2/3 | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| 2/3 Buser Modified Bone Scraper | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| PPBUSER23X | 12,400 円 | BL | ブラックライン | |
| PPBUSE2/36 | 11,000 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

J02/3および13K/13KLの変形版です。

■ ペリオドンタルチゼル カークランド



| カークランド 13K/13KL | | | | |
|-------------------|----------|--------|---------|-----|
| 13K/13KL Kirkland | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| S13K/13KL9 | 11,000 円 | #9 | エパーエッジ | |
| S13K/13KL6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |



| カークランド 13K/TG | | | | |
|-----------------|----------|--------|---------|-----|
| 13K/TG Kirkland | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| S13K/TG9 | 11,000 円 | #9 | エパーエッジ | |
| S13K/TG6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。




#9 エパーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エパーエッジ」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。

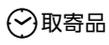

取寄品 取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ペリオドンタルチゼル パラッチ



先端幅:5.0mm

先端幅:4.0mm

パラッチ P24G/13KL

P24G/13KL, Palacci Modified

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------|---------|--------|---------|-----|
| SPAL13K6 | 9,700 円 | #6 | サテンスチール | |

■ ペリオドンタルチゼル タバネラ

先端幅:1.2mm



先端幅:1.2mm

タバネラ 1

Tabanella 1

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|---------|--------|---------|-----|
| TABANELLA3 | 9,100 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

先端幅:1.2mm



先端幅:1.2mm

タバネラ 2

Tabanella 2

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|---------|--------|---------|-----|
| TABANELLA4 | 9,100 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

■ ボーンチゼル(のみ)

ヒューフレディグループ製ボーンチゼルは、厳選された外科用ステンレススチールから丁寧にハンドメイドで製造されています。骨や歯牙の分割や形態修正などに使用します。

先端幅:3mm




| ガードナー 1 | | | | |
|-----------|----------|--------|-------|-----|
| 1 Gardner | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CG1 | 10,800 円 | #524 | 丸柄 | |

先端幅:4mm




| ● ガードナー 2 | | | | |
|-----------|----------|--------|-------|-----|
| 2 Gardner | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CG2 | 10,800 円 | #524 | 丸柄 | |

先端幅:4.3mm

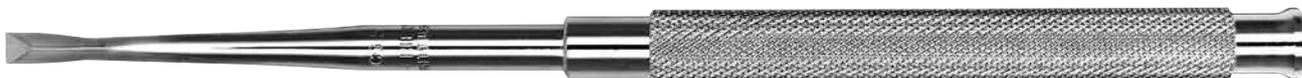

| ガードナー 5 | | | | |
|-----------|----------|--------|-------|-----|
| 5 Gardner | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CG5 | 10,800 円 | #524 | 丸柄 | ☺ |

先端幅:4mm

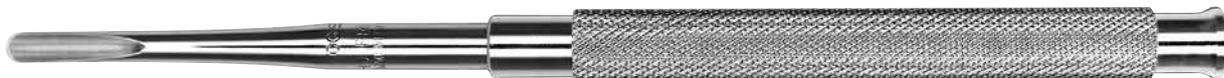

| ガードナー 9 | | | | |
|-----------|----------|--------|-------|-----|
| 9 Gardner | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CG9 | 10,800 円 | #524 | 丸柄 | |

先端幅:5.5mm



| ● クレイマー・クレイマ5.5mm | | | | |
|-------------------|----------|--------|-------|-----|
| 55 K-N | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CKN55 | 14,100 円 | #524 | 丸柄 | ☺ |

鋭く、片面カットの長いチゼルは分割した骨を広げるようデザインされています。チゼルの(幅、長さ、カットタイプ)選択は、骨髄の形および大きさによります。

先端幅:6.3mm



| ブーザー 6 | | |
|---------|----------|-----|
| 6 Buser | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| CBFL112 | 14,100 円 | ☺ |

先端幅:4.4mm



| ブーザー 4 | | |
|---------|----------|-----|
| 4 Buser | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| CBFL214 | 14,100 円 | |

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

鋭匙 (ボーンキュレット)
Curettes



外科 Surgical

Curettes

鋭匙 (ボーンキュレット)

ヒューフレディグループ製鋭匙(ボーンキュレット)は、さまざまな外科処置で多量の歯石や硬組織を容易に除去できる様にデザインされています。

太いハンドルと幅広い第一シャンクは、より把持しやすく操作性が向上することにより高い性能と効率を実現します。

■ ボーンキュレット ルーカス

掲載画像 CL84X

先端幅:2.0mm



先端幅:2.0mm

84

84 Lucas

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| CL84X | 9,900 円 | BL | ブラックライン | |
| CL846 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| CL84 | 8,800 円 | #522 | 角柄 | 🕒 |

掲載画像 CL85X

先端幅:2.5mm



先端幅:2.5mm

85

85 Lucas

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| CL85X | 9,900 円 | BL | ブラックライン | |
| CL856 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |

掲載画像 CL86X

先端幅:2.8mm



先端幅:2.8mm

86

86 Lucas

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| CL86X | 9,900 円 | BL | ブラックライン | |
| CL866 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| CL86 | 8,800 円 | #522 | 角柄 | 🕒 |

掲載画像 CL87X

先端幅:3.5mm



先端幅:3.5mm

87

87 Lucas

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| CL87X | 9,900 円 | BL | ブラックライン | |
| CL876 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| CL87 | 8,800 円 | #522 | 角柄 | 🕒 |

先端幅:4.7mm



先端幅:4.7mm

88

88 Lucas

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| CL886 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

標準価格は全て税抜価格です。

■ ボーンキュレットミラー

掲載画像 CM86



先端幅:3.4mm

先端幅:3.4mm

| 8 8 Miller | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CM86 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| CM8 | 8,800 円 | #522 | 角柄 | |

掲載画像 CM96



先端幅:2.8mm

先端幅:3.4mm

| 9 9 Miller | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CM96 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| CM9 | 8,800 円 | #522 | 角柄 | |

掲載画像 CM106



先端幅:2.9mm

先端幅:2.9mm

| 10 10 Miller | | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CM106 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| CM10 | 8,800 円 | #522 | 角柄 | |

掲載画像 CM116



先端幅:3.6mm

先端幅:3.6mm

| 11 11 Miller | | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CM116 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| CM11 | 8,800 円 | #522 | 角柄 | |

掲載画像 CM126



先端幅:4.2mm

先端幅:4.2mm

| 12 12 Miller | | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| CM126 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| CM12 | 8,800 円 | #522 | 角柄 | |

ハンドルの種類




#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

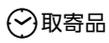

取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

鋭匙(ボーンキュレット)

Curettes



■ ボーンキュレット モルト

掲載画像 CM2/4X



先端幅:7.0mm

先端幅:3.5mm

モルト 2/4

2/4 Molt

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|---------|--------|---------|-----|
| CM2/4X | 9,900 円 | BL | ブラックライン | |
| CM2/4S6 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



■ ボーンキュレット ラバンカ



ラバンカ 7mm

Labanca Bone Curette

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| CSLABANCA6 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

ハンドルの種類




BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。

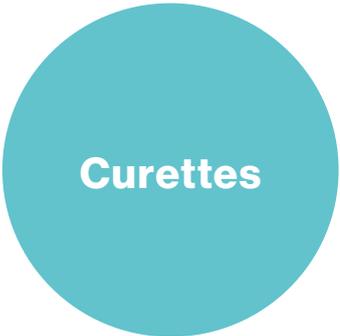

Curettes

ペリオサージカルキュレット

肉芽組織や歯肉縁下に固着した沈着物の除去に適した大型で堅牢なキュレットです。

■ ペリオサージカルキュレット



| カークランド8K/9K 8K/9K Kirkland | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SK8/96 | 6,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



| クレイマー・ネビンス 3/4 3/4 Kramer-Nevins | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SKN3/46 | 6,200 円 | #6 | サテンスチール | |

掲載画像 SKRA39



| クレイマー・ネビンス 3 KRA-3 Kramer | | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SKRA39 | 6,600 円 | #9 | エバーエッジ | |
| SKRA36 | 6,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

掲載画像 SPR1/29



| プリチャード 1/2 PR1/2 Prichard | | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SPR1/29 | 6,600 円 | #9 | エバーエッジ | |
| SPR1/26 | 6,200 円 | #6 | サテンスチール | |

ハンドルの種類




#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

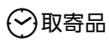

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Sinus Curettes

サイナスキュレット

シュナイダー膜の剥離や挙上、顎骨側壁からの膜の挙上などに使用します。

■ サイナスキュレット

掲載画像 SINC1X

先端幅:3.5mm

先端幅:3.5mm

サイナスキュレット 1
1 Sinus Curette

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| SINC1X | 14,300 円 | BL | ブラックライン | ☺ |
| SINC1 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

掲載画像 SINC2X

先端幅:2.8mm

先端幅:5.0mm

サイナスキュレット 2
2 Sinus Curette

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| SINC2X | 14,300 円 | BL | ブラックライン | ☺ |
| SINC2 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



エレベーター (ヘーベル)

ヒューフレディグループ製エレベーター(ヘーベル)は、さまざまなラインナップをご用意しております。熱処理により厳しい規格を満たしたイムニティスチール製で、太いハンドルと固定された先端部により高い操作性と耐久性を兼ね備えています。

■ エレベーター スペシャルタイプ

ハンドルが日本人の手の大きさに合うように開発されたコンパクトなエレベーターです。

先端幅:4.3mm 直



● **スペシャルタイプ 1S (E-S1)**
Special Type 1S

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|---------|-----|
| EL4032 | 9,500 円 | |

先端幅:4.2mm 曲



スペシャルタイプ 1C (E-C1)
Special Type 1C

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|---------|-----|
| EL3042 | 9,500 円 | |

先端幅:2.8mm 直



スペシャルタイプ 3S (E-S3)
Special Type 3S

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|---------|-----|
| EL3024 | 9,500 円 | |

先端幅:3.0mm 曲



スペシャルタイプ 3C (E-C3)
Special Type 3C

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|---------|-----|
| EL4014 | 9,500 円 | |

先端幅:2.5mm 直



スペシャルタイプ 4S (E-S4)
Special Type 4S

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|---------|-----|
| EL4031 | 9,500 円 | |

先端幅:2.5mm 曲



● **スペシャルタイプ 4C (E-C4)**
Special Type 4C

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|---------|-----|
| EL3092 | 9,500 円 | |

● おすすめ品


☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



エレベーター

先端幅:6.5mm

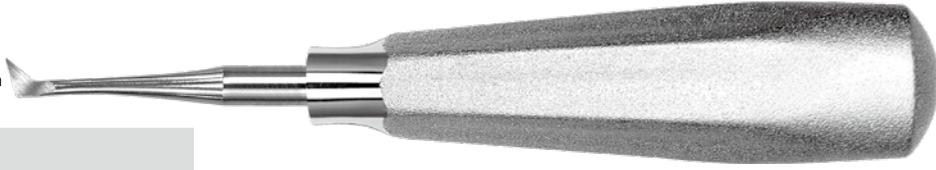


● ミニクライヤー21

21 Cryer Mini

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| E21 | 9,700 円 | ☺ |

第三大臼歯や歯根の抜去到適用

先端幅:6.5mm

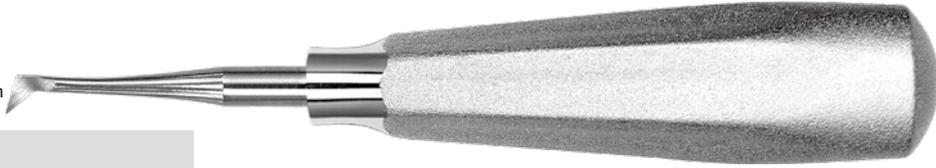

● ミニクライヤー 22

22 Cryer Mini

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| E22 | 9,700 円 | ☺ |


第三大臼歯や歯根の抜去到適用

おすすめの組み合わせ



E22を使用し、バーで分割した歯牙を抜去。

先端幅:9.0mm

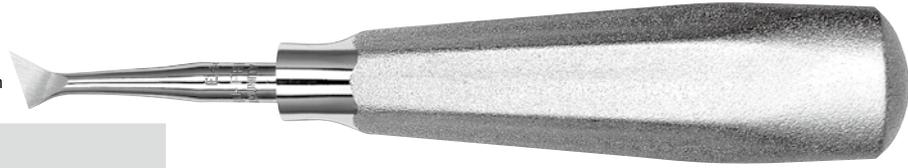


クライヤー44

44 Cryer Small

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| E44 | 9,700 円 | ☺ |

おすすめの組み合わせ

先端幅:9.0mm

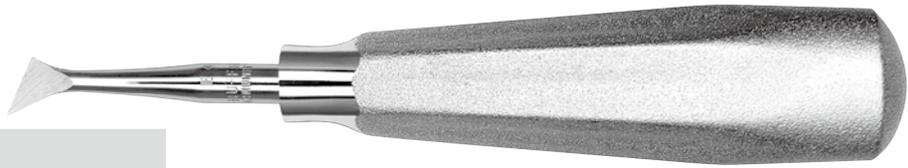


クライヤー 45

45 Cryer

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| E45 | 9,700 円 | ☺ |

先端幅:3.0mm

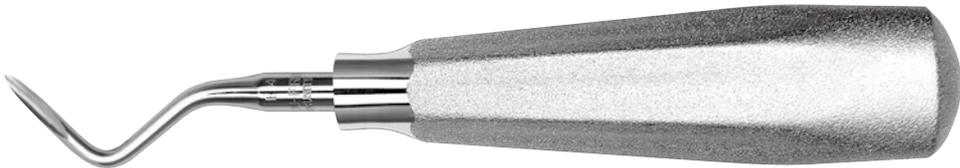

シュメッケバイヤー アペクス 4


4 Schmeckebier Apexo

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| E4 | 9,700 円 | ☺ |

シュメッケバイヤーは、破折した根や深く埋入した歯根用

おすすめの組み合わせ

先端幅:3.0mm

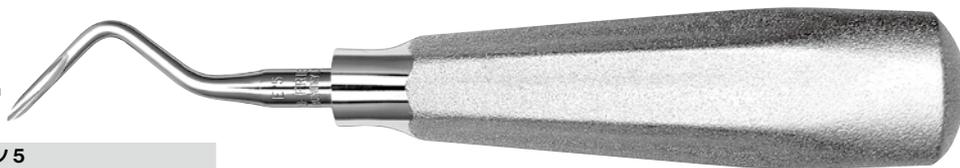

シュメッケバイヤー アペクス 5

5 Schmeckebier Apexo

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| E5 | 9,700 円 | ☺ |

シュメッケバイヤーは、破折した根や深く埋入した歯根用



先端幅:3.5mm 曲



| バーナードライト 6 | | |
|------------------------------|----------|-----|
| 6 Right Bernard Syndesmotome | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| BER6X | 12,100 円 | |



先端幅:3.5mm 曲

| バーナードレフト 7 | | |
|-----------------------------|----------|-----|
| 7 Left Bernard Syndesmotome | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| BER7X | 12,100 円 | |



先端幅:3.5mm 曲

| ● バーナード 11 | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| 11 Straight Bernard Syndesmotome | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| BER11X | 12,100 円 | |



Luxating Elevators

ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靭帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。エレベーターのように「てこの原理」で持ち上げたりして使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

■ ルクセーティングエレベーター

先端幅:2mm 曲



● **スリム 2C**

2mm Slim Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| ELSLIM2CSX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:2mm 直



スリム 2S

2mm Slim Straight

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| ELSLIM2SSX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:2mm 曲



2C

2mm Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| EL2CX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:2mm 直



2S

2mm Straight

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| EL2SX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:3mm 曲



● **スリム 3C**

3mm Slim Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| ELSLIM3CSX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:3mm直



スリム 3S

3mm Slim Straight

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| ELSLIM3SSX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:3mm曲



● **3C**

3mm Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| EL3CX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:3mm直



3S

3mm Straight

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| EL3SX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:4mm曲



4C

4mm Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| EL4CX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:4mm直



4S

4mm Straight

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| EL4SX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:5mm曲



● **5C**

5mm Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| EL5CX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |

先端幅:5mm直



5S

5mm Straight

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| EL5SX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |



Luxating Hybrids

ルクセーティングハイブリッド

適正な角度に屈曲した薄い先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靭帯を切断することができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。



■ ルクセーティングハイブリッド

掲載画像 EPTSMCX



先端幅:2.5mm

● 曲

Small Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|----------|--------|---------|-----|
| EPTSMCX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | |
| EPTSMC | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |

掲載画像 EPTSMDX



先端幅:2.3mm

● 遠心用 S

Small Distal

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|----------|--------|---------|-----|
| EPTSMDX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | |
| EPTSMD | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |

おすすめの組み合わせ

掲載画像 EPTSMMX



先端幅:2.3mm

● 近心用 S

Small Mesial

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|----------|--------|---------|-----|
| EPTSMMX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | |
| EPTSM | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |

掲載画像 EPTSSPX



先端幅:4.0mm

直 スパード

Straight Spade

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|----------|--------|---------|-----|
| EPTSSPX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | 🕒 |
| EPTSSP | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

掲載画像 EPTSMSX

先端幅:2.5mm



| 直 Small Straight | | | | |
|---------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| EPTSMSX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | ☺ |
| EPTSMS | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |

掲載画像 EPTLGDX

先端幅:4.0mm



| 遠心用 L Large Distal | | | | |
|-----------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| EPTLGDX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | ☺ |
| EPTLGD | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |

おすすめの組み合わせ

掲載画像 EPTLGMX

先端幅:4.0mm



| 近心用 L Large Mesial | | | | |
|-----------------------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| EPTLGMX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | ☺ |
| EPTLGM | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |



ルクセーティングハイブリッド キット

Luxating Hybrids Kit

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------------|-----------|--------|---------|-----|
| EPTKITX | 115,500 円 | BL | ブラックライン | |

ルクセーティングハイブリッド(BL)7種各1本、IMSカセット インフィニティ(IMN5081)を含む。
※ブラックラインキットには製品の特性上ストーンは含まれません。



● **ルクセーティングハイブリッド キット**

Luxating Hybrids Kit

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------------|-----------|--------|---------|-----|
| EPTKIT | 107,800 円 | #6 | サテンスチール | |

ルクセーティングハイブリッド(#6)7種各1本、IMSカセット(IM5080)、セラミックストーン円筒型を含む。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

Files- Bone

骨やすり

■ ボーンファイル

掲載画像 BF1X6



先端サイズ:4.8 x 8.2mm

先端サイズ:8.2 x 13.2mm

● ミラーコルバーン 1X

1X Miller-Colburn Cross-Cut

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| BF1X6 | 14,400 円 | #6 | サテンスチール | |
| BF1X | 14,400 円 | #522 | 角柄 | 🕒 |

小型パドルは大型パドルの半分の大きさです。



先端サイズ:6.2 x 23.0mm

先端サイズ:6.2 x 25.0mm

ミラーコルバーン 2X

2X Miller-Colburn Cross-Cut

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| BF2X6 | 14,400 円 | #6 | サテンスチール | |

曲と直の作業部のコンビネーション。



先端サイズ:4.8 x 8.2mm

先端サイズ:6.2 x 25.0mm

ミラーコルバーン 3X

3X Miller-Colburn Cross-Cut

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| BF3X6 | 14,400 円 | #6 | サテンスチール | |

曲の作業部と小型パドル型作業部のコンビネーション。



クロスカットのファイルは、どんな方向にでも切削力を加えることができます。

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イムニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イムニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

Files - Periodontal

やすり (ペリオドンタルファイル)

歯間部に使用します。

ファイルが両面についており、プッシュストロークとプルストロークに使用できます。

■ ペリオドンタルファイル



掲載画像 FS1/2S6

● シュガーマン 1S/2S
1S/2S Sugarman Mesial/Distal

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|----------|--------|---------|-----|
| FS1/2S6 | 10,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| FS1/2S | 10,800 円 | #2 | 角柄 | ☺ |

近遠心用(刃:2面)



掲載画像 FS3/4S6

● シュガーマン 3S/4S
3S/4S Sugarman Buccal/Lingual

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|----------|--------|---------|-----|
| FS3/4S6 | 10,800 円 | #6 | サテンスチール | |
| FS3/4S | 10,800 円 | #2 | 角柄 | ☺ |

骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。頬舌用(刃:3面)



バック 11/12
11/12 Buck Straight

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------|----------|--------|---------|-----|
| FB11/126 | 10,800 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



先端幅:1.7mm

先端幅:1.7mm

タバネラ
Tabanella Universal Bone File

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| TABANELLA2 | 10,800 円 | #6 | サテンスチール | |

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#2 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

☑ 取寄品 取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



抜歯鉗子

歯牙を抜去するために使用します。


ヒューフレディグループでは様々なラインナップの抜歯鉗子をご用意しています。

- プレジデンシャルシリーズ：鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インストゥルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作。
- アトラウメアシリーズ：表面のマット仕上げがライトの乱反射を抑制し、視認度を向上させ、またアクセスの良さ、歯冠と歯根の把持しやすさに重点を置き設計。
- ダイヤモンドダストシリーズ：アトラウメアシリーズの先端部にダイヤモンドダストを施し、歯牙の把持力が向上。
※ 抜歯鉗子のヒンジは開いた状態で洗浄、滅菌してください。

■ 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

薄いテーパ状の先端部

薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。

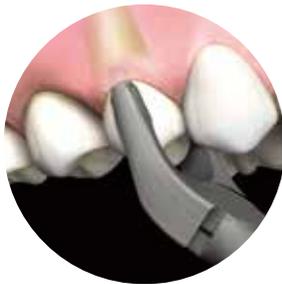

歯牙の把持力が20%UP※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較
把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。

従来品と比較して約35%軽量※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較
穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。

マット仕上げ


ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。




【上顎用】




| | | |
|---------------------------|---------|-----|
| ダイヤモンドダスト スタンダード 1 | | |
| 1 Standard Forceps | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| F1XSD | 39,600円 | |
| 上顎切歯用 ギザ付 | | |

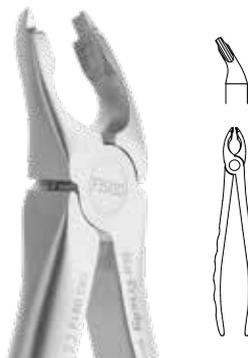

| | | |
|---------------------|---------|-----|
| ダイヤモンドダスト 35 | | |
| 35 | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| F35XSD | 39,600円 | |
| 上顎犬歯・小臼歯用 ギザ付 | | |

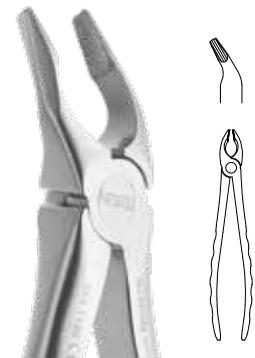

| | | |
|--------------------------|---------|-----|
| ダイヤモンドダスト アピカル 35 | | |
| 35 Apical | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| FAF35XSD | 39,600円 | |
| 上顎犬歯・小臼歯用 | | |

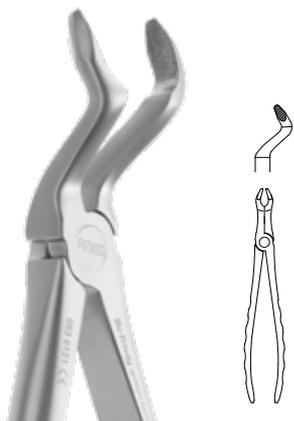

ダイヤモンドダスト 67
67

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| F67XSD | 39,600 円 | |


 上顎大白歯用



ダイヤモンドダスト 44
44 Root

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------------|----------|-----|
| FX44XSD | 39,600 円 | |

 上顎歯根用

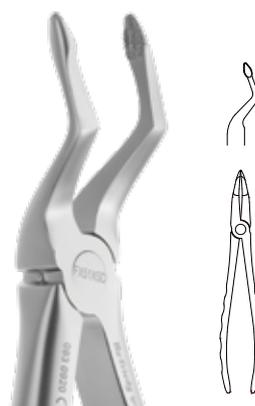


ダイヤモンドダスト 51
51 Root

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------------|----------|-----|
| FX51XSD | 39,600 円 | |

 上顎歯根用
ギザ付

【下顎用】

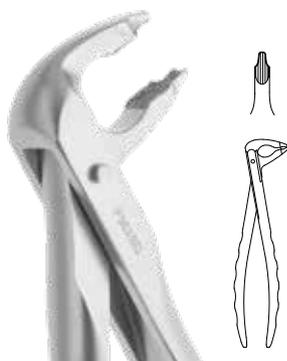

ダイヤモンドダスト 36
36

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| F36XSD | 39,600 円 | |

 下顎切歯用
ギザ付



ダイヤモンドダスト アピカル 36
36 Apical

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-----------------|----------|-----|
| FAF36XSD | 39,600 円 | |

 下顎切歯・小白歯用



ダイヤモンドダスト 13
13

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| F13XSD | 39,600 円 | |

 下顎小白歯用
ギザ付



ダイヤモンドダスト 21
21

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| F21XSD | 39,600 円 | |

 下顎大白歯用
ギザ付

ダイヤモンドダスト 45
45 Root

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------------|----------|-----|
| FX45XSD | 39,600 円 | |

 下顎歯根用
ギザ付

● おすすめ品


☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ 抜歯鉗子


【上顎前歯・小臼歯用】

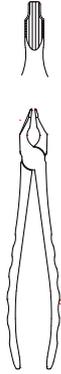

スタンダード1
1 Standard

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-----------|----------|-----|
| F1 | 26,100 円 | |


上顎切歯・犬歯用
プレジデンシャルシリーズ

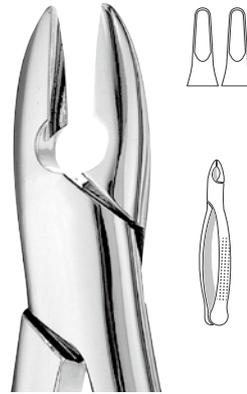

アトラウメア 35
35 Forceps, Atraumair

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------------|----------|-----|
| F35XS | 35,200 円 | ☺ |

上顎犬歯・小臼歯用
ギザ付

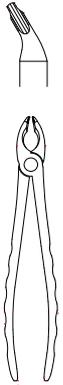

アトラウメア スタンダード1
1 Standard Forceps, Atraumair



| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|----------|-----|
| F1XS | 35,200 円 | ☺ |

上顎切歯用
ギザ付

● **クライヤー ユニバーサル 150**
150 Cryer Universal

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|----------|-----|
| F150 | 26,100 円 | |


上顎切歯・犬歯・小臼歯・歯根用 左右共用
プレジデンシャルシリーズ

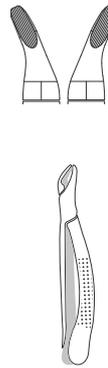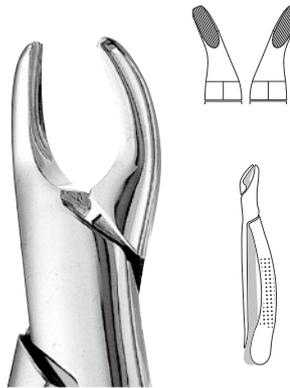

アトラウメア アピカル 35
35 Apical Forceps, Atraumair

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------------|----------|-----|
| FAF35XS | 35,200 円 | ☺ |

上顎犬歯・小臼歯用

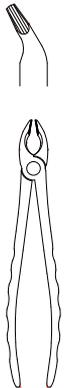

【上顎臼歯用】



● **10S**
10S

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|----------|-----|
| F10S | 26,100 円 | |


上顎臼歯用
プレジデンシャルシリーズ



アトラウメア 67
67 Forceps Upper Molars, Atraumair

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------------|----------|-----|
| F67XS | 35,200 円 | ☺ |

上顎臼歯用

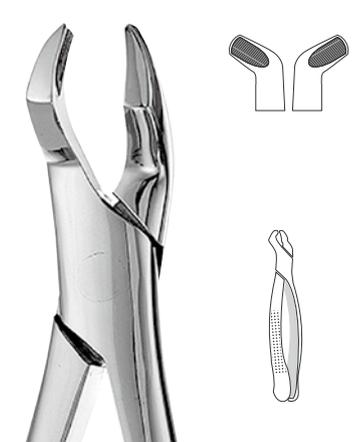

210S
210S

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------------|----------|-----|
| F210S | 26,100 円 | |

上顎第3大臼歯用
プレジデンシャルシリーズ

標準価格は全て税抜価格です。

【下顎前歯・小白歯用】



● **クライヤーユニバーサル151**
151 Cryer Universal

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|----------|-----|
| F151 | 26,100 円 | |

 下顎切歯・犬歯・小白歯・歯根用 左右共用
プレジデンシャルシリーズ



アトラウメア 36
36 Forceps, Atraumair

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------------|----------|-----|
| F36XS | 35,200 円 | ☺ |


 下顎切歯用
ギザ付



アトラウメア アピカル 36
36 Apical Forceps, Atraumair

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------------|----------|-----|
| FAF36XS | 35,200 円 | ☺ |

 下顎小白歯・切歯用

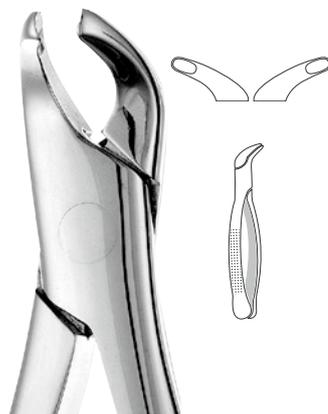

203
203

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|----------|-----|
| F203 | 26,100 円 | |

 下顎切歯・犬歯・小白歯・歯根用
プレジデンシャルシリーズ

【下顎大白歯用】



● **ハリス 17**
17 Harris

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------|----------|-----|
| F17 | 26,100 円 | |

 下顎第1・第2大白歯用
プレジデンシャルシリーズ



アトラウメア カウホーン 23
23 Cowhorn Forceps, Atraumair

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------------|----------|-----|
| F23XS | 35,200 円 | ☺ |

 下顎大白歯用



222
222

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|----------|-----|
| F222 | 26,100 円 | |

 下顎第3大白歯用
プレジデンシャルシリーズ

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



【残根用】




| | | |
|----------------|----------|-----|
| トームズ 69 | | |
| 69 Tomez | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| F69 | 26,100 円 | |

上下顎破折根・歯根用
プレジデンシャルシリーズ



| | | |
|----------------------|----------|-----|
| ● ヒューフレディ 300 | | |
| 300 Root | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| F300 | 31,500 円 | |

上顎歯根用、ギザ付
プレジデンシャルシリーズ

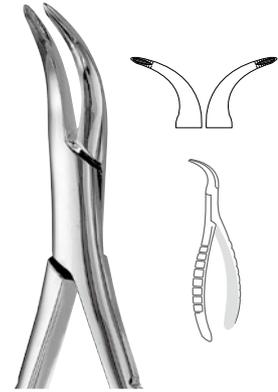


| | | |
|----------------------|----------|-----|
| ● ヒューフレディ 301 | | |
| 301 Root | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| F301 | 31,500 円 | |

下顎歯根用、ギザ付
プレジデンシャルシリーズ



| | | |
|----------------------------|----------|-----|
| アトラウメア 51 | | |
| 51 Root Forceps, Atraumair | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| FX51XS | 35,200 円 | 🕒 |

上顎歯根用、ギザ付

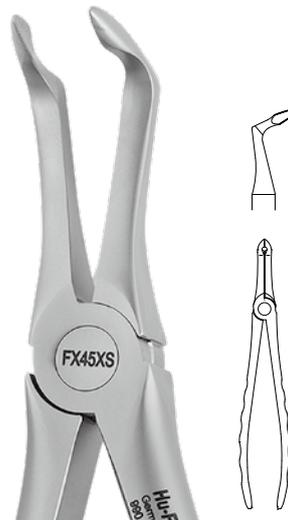

| | | |
|----------------------------|----------|-----|
| アトラウメア 45 | | |
| 45 Root Forceps, Atraumair | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| FX45XS | 35,200 円 | 🕒 |

下顎歯根用、ギザ付

■ 抜歯鉗子 プレジデンシャル小児用

ヒューフレディグループ製の乳歯用鉗子は、デリケートな組織と骨を保護するようにデザインされており、患児に対しより負担の少ない抜歯が可能となるように貢献します。小児の小さな口と歯の表面に合わせた設計で、他の鉗子同様に独自に開発された合金を使用しています。



プレジデンシャル小児用 150S レインボー

Rainbow Presidential™ Forceps Pedo Series

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| F150SR | 27,300 円 | |

ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャル レインボーは、虹色カラーを採用し、患児の抜歯体験が暗いイメージにならないようにという思いが秘められています。

上顎第1乳臼歯・歯根用、左右共用
プレジデンシャルシリーズ



● プレジデンシャル小児用 151S レインボー

151SR Pedo Rainbow

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| F151SR | 27,300 円 | |

ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャル レインボーは、虹色カラーを採用し、患児の抜歯体験が暗いイメージにならないようにという思いが秘められています。

下顎第1乳臼歯・歯根用、左右共用



プレジデンシャル小児用 150S

Presidential™ Forceps Pedo Series

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| F150S | 26,100 円 | ☺ |

上顎第1乳臼歯・歯根用、左右共用
プレジデンシャルシリーズ



プレジデンシャル小児用 151S

151S Pedo

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| F151S | 26,100 円 | ☺ |

下顎第1乳臼歯・歯根用、左右共用
プレジデンシャルシリーズ



■ 抜歯鉗子 使用部位チャート & お手入れ方法

【上顎用抜歯鉗子】

| 規格 | ダイヤモンドダスト | アトラウメア | プレジデンシャルシリーズ | 切歯用 | 犬歯用 | 小臼歯用 | 第1大臼歯用 | 第2大臼歯用 | 第3大臼歯用 | 歯根用 | 乳歯用 |
|-----------------|-----------|--------|--------------|-----|-----|------|--------|--------|--------|-----|-----|
| スタンダード1 | ★ | ★ | | ● | | | | | | | |
| スタンダード1 | | | ★ | ● | ● | | | | | | |
| 35 | ★ | ★ | | | ● | ● | | | | | |
| アピカル 35 | ★ | ★ | | | ● | ● | | | | | |
| クライヤー ユニバーサル150 | | | ★ | ● | ● | ● | | | | ● | |
| 67 | ★ | ★ | | | | | ● | ● | ● | | |
| 10S | | | ★ | | | | ● | ● | ● | | |
| 210S | | | ★ | | | | | | ● | | |
| 44 | ★ | | | | | | | | | ● | |
| 51 | ★ | ★ | | | | | | | | ● | |
| 300 | | | ★ | | | | | | | ● | |
| 150S | | | ★ | | | | | | | | ● |
| 150SR | | | ★ | | | | | | | | ● |

【下顎用抜歯鉗子】


| 規格 | ダイヤモンドダスト | アトラウメア | プレジデンシャルシリーズ | 切歯用 | 犬歯用 | 小臼歯用 | 第1大臼歯用 | 第2大臼歯用 | 第3大臼歯用 | 歯根用 | 乳歯用 |
|----------|-----------|--------|--------------|-----|-----|------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 36 | ★ | ★ | | ● | | | | | | | |
| アピカル 36 | ★ | ★ | | ● | ● | ● | | | | | |
| 13 | ★ | | | | | ● | | | | | |
| 151 | | | ★ | ● | ● | ● | | | | ● | |
| 203 | | | ★ | ● | ● | ● | | | | ● | |
| ハリス 17 | | | ★ | | | | ● | ● | | | |
| 21 | ★ | | | | | | ● | ● | ● | | |
| カウホーン 23 | | ★ | | | | | ● | ● | ● | | |
| 222 | | | ★ | | | | | | ● | | |
| 45 | ★ | ★ | | | | | | | | ● | |
| 69 | | | ★ | | | | | | | ● | |
| 301 | | | ★ | | | | | | | ● | |
| 151S | | | ★ | | | | | | | | ● |
| 151SR | | | ★ | | | | | | | | ● |

抜歯鉗子の先端部


抜歯鉗子の先端部は、解剖学的に歯頸線上やその下の部分に当たるようにデザインされています。

先端部は、歯冠や歯根の形態に適合するようさまざまなデザインがあります。


多くの先端部はギザ付になっており、抜歯の際につかみやすくなっています。

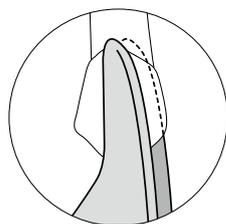

単根歯用

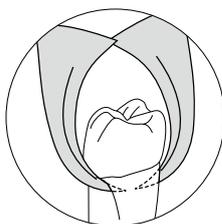

二根歯用

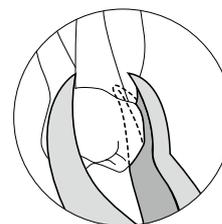

三根歯用

ヒューフレディグループ製抜歯鉗子のお手入れ

正しい機能と外観を維持するため、以下の点にご注意ください。

- ・滅菌器に入れる前に完全に洗浄・乾燥してください。
- ・ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄・滅菌してください。

長くご愛用いただくために

- ・滑らかな動きを保つために、IMS潤滑スプレー (ILS) を使用してください。
- ・水の中や蒸気で湿ったままの状態でも長時間放置しないでください。
- ・滅菌後は完全に乾燥させてください。
- ・強い酸やガスに近づけないでください。

Grafting Instruments

移植用インスツルメント

ヒューフレディグループ製移植用インスツルメントはひとつひとつハンドメイドで、厳選された高品質なステンレススチールから製造されています。移植材を移動しやすく、造成しやすいようにデザインされています。

■ ボーンプラガー



先端径:3.35mm

● グリスデイル
Grisdale Bone Condenser

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|---------|--------|---------|-----|
| PLGGR1X | 7,700 円 | BL | ブラックライン | |

先端径:4.0mm



先端サイズ:3.0 x 1.5mm

ラバンカ
Labanca

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|---------|--------|---------|-----|
| PLGLABANCX | 7,700 円 | BL | ブラックライン | |

先端サイズ:3.0 x 1.5mm



先端径:3.0mm

ジョバノビック 4
4 Jovanovic

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------|---------|--------|---------|---|
| PLGJO/46 | 7,300 円 | #6 | サテンスチール |  |

先端径:3.0mm



先端径:3.0mm

ジョバノビック 5
Jovanovic Bone Condenser/Periosteal

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------|---------|--------|---------|-----|
| PLGJO/56 | 7,300 円 | #6 | サテンスチール | |

先端幅:4.7mm



先端径:7.0mm

ボーンプラガー/コンデンサー
Bone Condenser/Plugger

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------|----------|--------|---------|---|
| CSEUWES6 | 10,200 円 | #6 | サテンスチール |  |

先端径:3.0mm

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ボーングラフトスcoop

掲載画像 IMP6522X



先端サイズ:5 x 21mm

先端サイズ:10 x 25mm

● ボーングラフトスcoop

Bone Graft Scoop

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------|----------|--------|---------|-----|
| IMP6522X | 16,300 円 | BL | ブラックライン | |
| IMP65226 | 15,200 円 | #6 | サテンスチール | |

■ ボーンスcoop



先端径:5.0mm

ボーンスcoop ジョバノビック

Jovanovic Bone Scoop

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|-------|-----|
| BSJ05 | 13,200 円 | #510 | 角柄 | 🕒 |

■ メンブレンプレーサー



先端幅:1.9mm

先端径:0.6mm

メンブレンプレーサー

Membrane Placement Instrument

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| PMP1X | 9,900 円 | BL | ブラックライン | |

GTRメンブレンの配置用です。尖った先端でメンブレンを配置します。

■ ボーンパッカー



先端径:8.0mm

先端径:6.0mm

ボーンパッカー 6-8mm

Bone Packer

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| BPACK | 10,200 円 | #6 | サテンスチール | |

■ イミュニティスチールカップ



イミュニティスチールカップグラフト用

Immunity Steel Cup, Modified


| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| MUCPE | 10,500 円 | |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し、疲れにくい仕様。

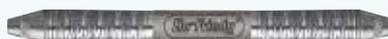

#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



ガーゼパッカー

Gauze Packer

■ ガーゼパッカー



ガーゼパッカー ヒューフレディ

Gauze Packer

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------------|---------|--------|---------|---|
| GPHF6 | 8,600 円 | #6 | サテンスチール |  |

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

Hemostats

止血鉗子

止血、残根の除去、不安定なものの固定等様々な用途に対応できるインスツルメントです。



■ 止血鉗子



ケリー直1
1 Kelly Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| H1 | 10,300円 | |

全長:14cm



● ホルステッド・モスキート曲3
3 Halsted Mosquito Curved

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| H3 | 10,300円 | |

全長:12cm



● ホルステッド・モスキート直4
4 Halsted Mosquito Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| H4 | 10,300円 | |

全長:12cm



ケリー曲2
2 Kelly Curved

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| H2 | 10,300円 | |

全長:14cm



アドソン曲
Adson Curved

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| HAC | 13,500円 | 🕒 |

全長:19cm



アドソン直
Adson Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| HAS | 13,500円 | 🕒 |

全長:19cm



コーチャー 曲
Kocher 1 x 2 Curved

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------|---------|-----|
| HKC | 10,300円 | ☺ |

全長:14cm



ロチェスター・ペアン 曲
Rochester-Pean Curved

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|---------|-----|
| HRPC | 10,300円 | |

全長:16cm

☺ 取寄品 取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



サイナスリフトインスツルメント

ヒューフレディグループは、幅広いサイナスリフトインスツルメントのラインナップを取り揃えています。シュナイダー膜の剥離や挙上、さらに上顎骨側壁から膜を挙上するために適切なアクセスが得られるよう、多様なサイズや作業部位の形態、角度のオプションがあります。



■ サイナスリフトインスツルメント



先端幅:4.5mm

先端幅:3.5mm

| 300 | | | | |
|---------|----------|--------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| IMP3006 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



先端幅:3.3mm

先端幅:5.8mm

| シミオン | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-----|
| Simion | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| IMP300SIM | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



先端幅:3.0mm

先端幅:3.0mm

| 3mm | | | | |
|-----------|----------|--------|--------------|-----|
| 3mm | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| IMP6345S6 | 13,200 円 | #6S | サテンスチール ショート | ☺ |



先端幅:3.4mm

先端幅:3.4mm

| 6523S | | | | |
|------------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| 6523S, Sinus Lift Instrument Small | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| IMP6523S6 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6S サテンスチールショート

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



● **クレイマー・ネビンス 6577**

6577 Kramer-Nevins, Acute

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------------|----------|--------|---------|-----|
| IMP6577SCX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | |
| IMP6577SC6 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |



● **クレイマー・ネビンス 6578**

6578 Kramer-Nevins, Obtuse

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------------|----------|--------|---------|-----|
| IMP6578SX | 14,300 円 | BL | ブラックライン | |
| IMP65786 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | |



PESIM1

Single-End

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------------|----------|--------|---------|-----|
| PESIM16 | 13,200 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

■ **インプラントプローブ**



カラーコードプローブ インプラントスペーサー 片頭 20mm

Implant Spacer 20mm

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-----------------|---------|--------|---------|-----|
| PCP65006 | 5,400 円 | #6 | サテンスチール | |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ペリオナイフ
Knives



Knives

ペリオナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部組織の切除に使用されます。さまざまな外科処置に対応できるように、隣接歯間部へ適用する槍型から楕円形まで豊富なデザインがあります。

外科 Surgical

■ トンネリングナイフ

掲載画像 TKN1X



先端幅:1.8mm

先端幅:2.4mm

● トンネリングナイフ 1

1 Tunneling Knife

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| TKN1X | 12,800 円 | BL | ブラックライン | |
| TKN1 | 11,700 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

掲載画像 TKN2X



先端幅:1.8mm

先端幅:2.4mm

● トンネリングナイフ 2

2 Tunneling Knife

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| TKN2X | 12,800 円 | BL | ブラックライン | |
| TKN2 | 11,700 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



先端幅:3.0mm

先端幅:3.0mm

ステイグマンソフトティッシュスプリッター

Soft Tissue Splitter Steigmann

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|----------|--------|----------|-----|
| TKSTEIG | 11,700 円 | #SS | スムーズハンドル | ☺ |

遊離歯肉と結合組織の移植のため、粘膜骨膜の剥離、基底側の結合組織からの上皮の剥離、軟組織の分割用として設計されています。



ブレード幅:3.0mm

ブレード幅:3.0mm

ステイグマンソフトティッシュスプリッター 改良型

Soft Tissue Splitter Steigmann, Modified

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------|----------|--------|----------|-----|
| TKSTEIG2 | 11,700 円 | #SS | スムーズハンドル | ☺ |


遊離歯肉と結合組織の移植のため、粘膜骨膜の剥離、基底側の結合組織からの上皮の剥離、軟組織の分割用として設計されています。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し、疲れにくい仕様。

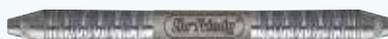

#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#SS スムースハンドル

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。マット加工が施されたためのハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。

H37

■ トンネリングインスツルメント



先端幅:1.5mm

先端幅:1.5mm

| トンネリングインスツルメント クインシー 1 | | | | |
|---|----------|--------|---------|-----|
| Giles de Quinsey Tunneling Instrument 1 | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| FQUINCEY1X | 13,200 円 | BL | ブラックライン | |



先端幅:1.5mm

先端幅:1.5mm

| トンネリングインスツルメント クインシー 2 | | | | |
|---|----------|--------|---------|-----|
| Giles de Quinsey Tunneling Instrument 2 | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| FQUINCEY2X | 13,200 円 | BL | ブラックライン | |

■ ペリオドンタルナイフ



ブレード幅:2.5mm

ブレード幅:2.5mm

掲載画像 KO1/2X

| ● オーバン 1/2 | | | | |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| 1/2 Orban | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| KO1/2X | 15,900 円 | BL | ブラックライン | |
| KO1/29 | 13,800 円 | #9 | エパーエッジ | |
| KO1/26 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | |

角度のついたブレードと複屈曲のシャンクが臼歯部での使用に適用。隣接歯間部歯肉の切除にも使用。



ブレード幅:2.5mm

ブレード幅:2.5mm

| オーバン ロング 1/2 | | | | |
|-----------------|----------|--------|---------|-----|
| 1/2 Orban, Long | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| KO1/2IU6 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | |



ブレード幅:2.3mm

ブレード幅:2.3mm

掲載画像 KO12KPO3AX

| オーバン アレン改良型 1/2 | | | | |
|--------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| 1/2 Allen Modified Orban Knife | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| KO12KPO3AX | 15,900 円 | BL | ブラックライン | |
| KO12KPO3A9 | 13,800 円 | #9 | エパーエッジ | ☺ |
| KO12KPO3A6 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

KO1/2に比べ30%薄いデザイン
垂直のおよび水平的方向への骨膜上粘膜を切除します。丸みを帯びた先端部により穿孔のリスクが低減されます。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#9 エパーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エパーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

掲載画像 KO12KPO3RX



オーバンアレン改良型 1/2R
1/2 Allen Modified Orban Knife, Round

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------------|----------|--------|---------|-----|
| KO12KPO3RX | 15,900 円 | BL | ブラックライン | 🕒 |
| KO12KPO3AR | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

KO1/2に比べ30%薄く、丸い先端部。骨膜上粘膜の、垂直・水平方向の切除に使用します。エッジが丸く、穿孔の危険性を回避できます。

掲載画像 KPAX



アレン
Allen End-Cutting Intrасulcular Knife

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|----------|--------|---------|-----|
| KPAX | 15,900 円 | BL | ブラックライン | |
| KPA | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | |

ポケット底部から歯槽骨頂への付着を切断するために使用します。ポケット内の一次切開用です。



アレンアローヘッド
Allen Arrowhead Knife

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------------|----------|--------|--------|-----|
| KO12KP3R49 | 13,800 円 | #9 | エパーエッジ | 🕒 |

掲載画像 KK15/16X



● **カークランド 15/16**
15/16 Kirkland

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-----------------|----------|--------|---------|-----|
| KK15/16X | 15,900 円 | BL | ブラックライン | |
| KK15/169 | 13,800 円 | #9 | エパーエッジ | |
| KK15/166 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | |

歯肉除去や歯肉整形時の第一次斜切開用。特に臼歯部に適用



クレイマー・ネビンス 7
7 Kramer-Nevins

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------------|----------|--------|---------|-----|
| KKN76 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

キドニー型の鋭利なナイフで、歯肉切除や歯肉整形術を手早く行えます。近遠心の切開歯肉を薄くしたり、壊死組織除去の際の歯肉開創や遠心部・隣接部の歯肉整形にも適しています。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#9 エパーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エパーエッジ」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



ブレード幅:4.0mm

ブレード幅:4.0mm

クレイマー・ネビンス 11

11 Kramer-Nevins

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------------|----------|--------|---------|-----|
| KKN116 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | |

薄くて鋭利な銃剣型のナイフで、歯肉切除術を行う際の歯間部や環状の二次切開用にデザインされています。
切開位置決定の段階における歯間部の環状組織の切開や除去、遠心部や近心部のウェッジの除去にも使用できます。



ブレード幅:8.3mm

ブレード幅:8.3mm

バック 3/4

3/4 Buck

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------------|----------|--------|---------|-----|
| KB3/46 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



ブレード幅:3.3mm

ブレード幅:3.3mm

バック 5/6

5/6 Buck

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------------|----------|--------|---------|-----|
| KB5/66 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



ブレード幅:3.6mm

ブレード幅:3.6mm

クレイン・カプラン 3

CK-3 Crane-Kaplan

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------------|----------|--------|---------|-----|
| KCK366 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



ブレード幅:6.4mm

ブレード幅:6.4mm

● **ゴールドマンフォックス 7**

7 Goldman-Fox

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------------|----------|--------|---------|-----|
| KGF76 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | |

ヘビージャックタイプ - 長斜切開に適したブレード角度。
楕円形のブレードなので臼歯部に適用。

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミューニティスチール」製。
軽い力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



● **ゴールドマンフォックス 8**

8 Goldman-Fox

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------------|----------|--------|---------|-----|
| KGF86 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | |

槍型(スピア)ポイントー 第一次切開後の歯間部切開に使用。
頬舌用の使いやすい角度のブレード。



● **ゴールドマンフォックス 9**

9 Goldman-Fox

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------------|----------|--------|---------|-----|
| KGF96 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

コンビネーションタイプー 槍型(スピア)のブレードは臼歯部から下顎に、
鎌型のブレードは歯間部に使用します。

掲載画像:KGF11X



● **ゴールドマンフォックス 11**

11 Goldman-Fox

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------------|----------|--------|---------|-----|
| KGF11X | 15,900 円 | BL | ブラックライン | |
| KGF116 | 12,300 円 | #6 | サテンスチール | |

槍型(スピア)ポイントー #8と同タイプですが、
臼歯部に適合しやすいようにブレード角度が補正されています。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。
太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イムニティスチール」製。
軽いついで把持することができるためのハンドル。

Mouth Gags

マウスギャグ(開口器)

■ マウスギャグ



| モルト 大人用 | | |
|-------------------|----------|-----|
| Molt Adult, Large | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| MGA | 39,600 円 | ☺ |
| 交換用チップ 大人用 | | |
| Adult, Large | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| PTRTA | 1,400 円 | |

| ● モルト 小人用 | | |
|--------------------|----------|-----|
| Molt Child, Medium | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| MGC | 39,600 円 | |
| 交換用チップ 小人用 | | |
| Child, Medium | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| PTRTC | 1,400 円 | |

| ● モルト 幼児用 | | |
|--------------------|----------|-----|
| Molt Infant, Small | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| MGI | 39,600 円 | |
| 交換用チップ 幼児用 | | |
| Infant, Small | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| PTRTI | 1,400 円 | |

※欧米サイズのため日本人には一般成人の方でも
"小人用"が適用です。
※交換用チップは2個(1ペア)入です。

一人でも容易に着脱可能!

アシスタントさんがつかない時や訪問診療時など、
一人で処置しなければならない時、
容易に開閉・ロック解除ができる形状!
スタッフ不足でも安心!

しっかり・安定のホールド

噛む部分が広くしっかりホールドできるため、顎に不随意運動がある
患者さんなどに特に有効!
柄に適度な長さがあるため、一度開口すれば安定した開口状態をキープ!

[落ちない][取れない][壊れにくい]

作業部にしっかりと装着されたシリコン製チップは、口腔内で落下して
しまったり、着脱時に取れてしまう可能性が低く、患者さんが強い力で
噛んでも壊れにくい頑丈設計!



マウスギャグの装脱着方法は
こちらからご覧いただけます

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

マウスプロップ
Mouth Props





マウスプロップ

抜歯時の開口補助や麻酔下の患者さんのTMJ障害*を軽減するためなどに使用します。

*TMJ障害: Temporomandibular Joint Disorder (顎関節機能障害)

■ マウスプロップ

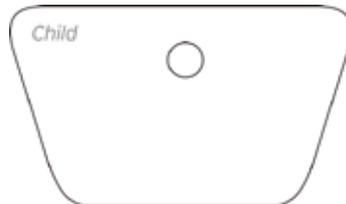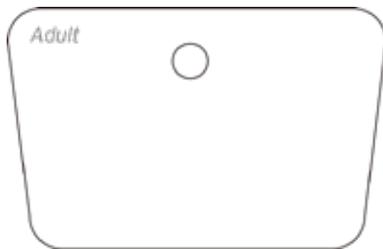

● マーケル ラテックスフリー 大人用

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| MP54 | 6,400 円 | 🕒 |

2個入

● マーケル ラテックスフリー 小人用

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| MP52 | 6,400 円 | 🕒 |

2個入

● マーケル ラテックスフリー 小人用 S

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|---------|-----|
| MP48 | 6,400 円 | 🕒 |


2個入

Needle Holders

持針器

縫合針を確実に把持するロックがあり、これにより適度な握り圧で縫合針を軟組織に通すことが可能です。
 パーマシャープ：先端の両側に細かいピラミッド状の突起を付与したタンブステンカーバイドが貼り付けられ、確実に縫合針を把持します。(ハンドルが金色のもの)
 ダイヤモンドダスト：マイクロサージェリーなどで用いる繊細な縫合針を傷つけずに把持します。
 スタンダード：ステンレス製で、ステンレス製の縫合針に対して過度な力を加えることなく適切に把持します。

持針器 カストロビージョ

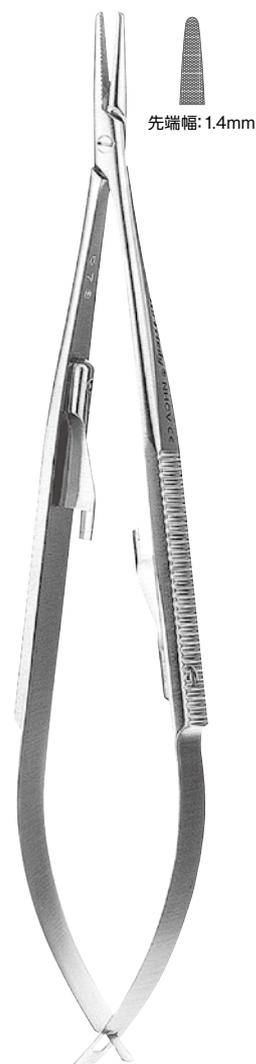

● **カストロビージョ 直 5020**
Castroviejo Straight
 パートコード 標準価格 取寄品
NH5020 78,800 円

全長:14cm
 ※5-0, 6-0, 7-0
 パーマシャープ
 (タンブステンカーバイド付)

● **カストロビージョ 直 5020R**
Castroviejo Straight
 パートコード 標準価格 取寄品
NH5020R 78,800 円

全長:14cm
 ※5-0, 6-0, 7-0
 パーマシャープ
 (タンブステンカーバイド付)
 ラウンドハンドル

● **カストロビージョ 曲 5021**
Castroviejo Curved
 パートコード 標準価格 取寄品
NH5021 78,800 円

全長:14cm
 ※5-0, 6-0, 7-0
 パーマシャープ
 (タンブステンカーバイド付)

● **カストロビージョ**
Castroviejo
 パートコード 標準価格 取寄品
NHCV 54,600 円

全長:14cm
 ※5-0, 6-0, 7-0, 8-0

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

持針器
Needle Holders



外科 Surgical

【NH5024シリーズ】



先端幅:1.5mm



先端幅:1.8mm



先端幅:1.5mm



先端幅:1.5mm

カストロビージョ
直 5024

Castrovillejo Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| NH5024 | 80,900 円 | |

全長:18cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

カストロビージョ
直 5024R

Castrovillejo Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------|----------|-----|
| NH5024R | 80,900 円 | |

全長:18cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

● カストロビージョ
曲 5024RC

Castrovillejo Curved

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------|----------|-----|
| NH5024RC | 80,900 円 | |

全長:18cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

カストロビージョコーテリニ直

Cortellini Castrovillejo Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------|----------|-----|
| NH5024CORT | 80,900 円 | |

全長:18cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより細目の先端

※針付縫合糸の推奨サイズ
標準価格は全て税抜価格です。

■ 持針器 マイクロカストロビージョ

マイクロカストロビージョには、縫合針を確実に把持するロックがあります。これにより、把持力をコントロールしながら厚い歯肉に縫合糸を通すことが可能です。



● **カストロビージョシミアン直**
Simion Castroviejo Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------------|----------|-----|
| NH5024SIM | 80,900 円 | |

全長:18cm
※3-0, 4-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより大きめな先端

マイクロカストロビージョ直 5020M
Micro Castroviejo Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------------|----------|-----|
| NH5020M | 78,800 円 | |

全長:14cm
※5-0, 6-0, 7-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
NH5020より細目の先端

マイクロカストロビージョ曲 5021M
Micro Castroviejo Curved

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------------|----------|-----|
| NH5021M | 78,800 円 | |

全長:14cm
※5-0, 6-0, 7-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
NH5021より細目の先端

マイクロカストロビージョ直 5025R
Micro Castroviejo Straight Diamond Dusted

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------------|----------|-----|
| NHM-5025R | 73,500 円 | |

全長:15cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
ダイヤモンドダスト
ラウンドハンドル

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。




先端幅: 1.0mm



先端幅: 1.0mm



先端幅: 1.0mm

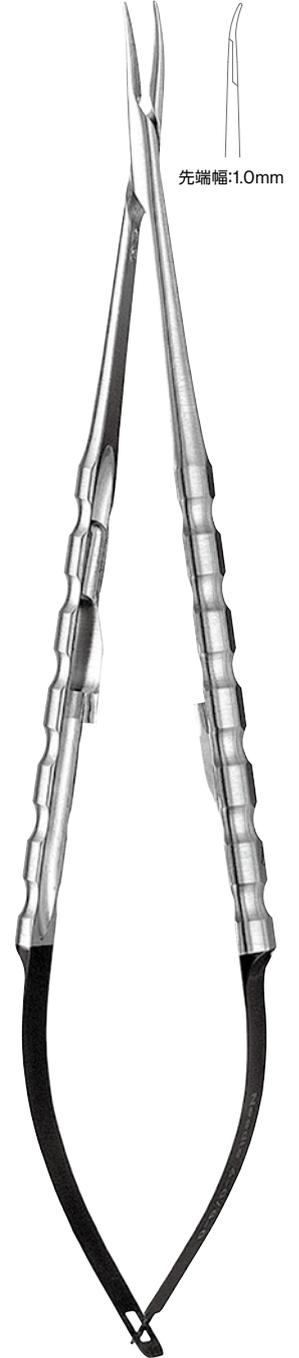

先端幅: 1.0mm

マイクロカストロビージョ
曲 5027
Micro Castroviejo Curved
パートコード 標準価格 取寄品
NHM-5027 73,500 円 ☺

全長:13cm
※6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0

マイクロカストロビージョ
直 5028
Micro Castroviejo Straight
パートコード 標準価格 取寄品
NHM-5028 73,500 円 ☺


全長:13cm
※6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0

マイクロカストロビージョ
直 DPV
Micro Castroviejo Straight Diamond Dusted
パートコード 標準価格 取寄品
NHDPV 86,100 円

全長:18cm
※6-0, 7-0, 8-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル


● マイクロカストロビージョ
曲 DCPV
Micro Castroviejo Curved Diamond Dusted
パートコード 標準価格 取寄品
NHDCPV 86,100 円

全長:18cm
※6-0, 7-0, 8-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

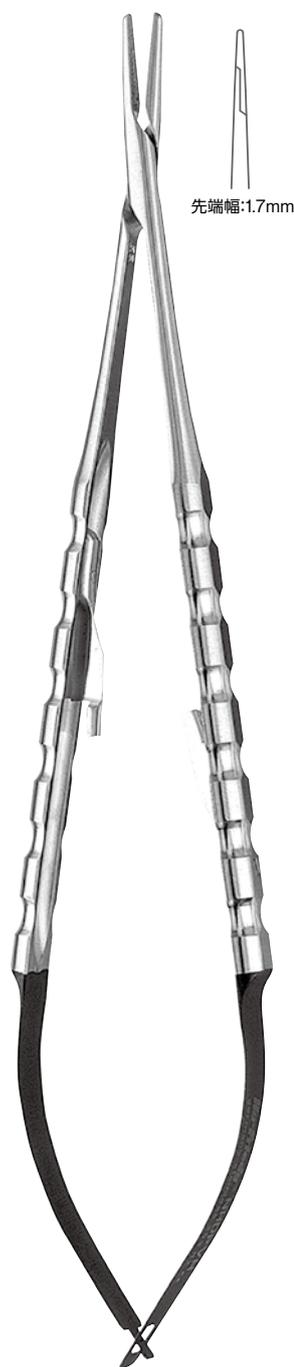

マイクロカストロビージョ 直 DPVN
Micro Castroviejo Straight Diamond Dusted
パートコード 標準価格 取寄品
NHDPVN 86,100 円

全長:18cm
※4-0, 5-0, 6-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

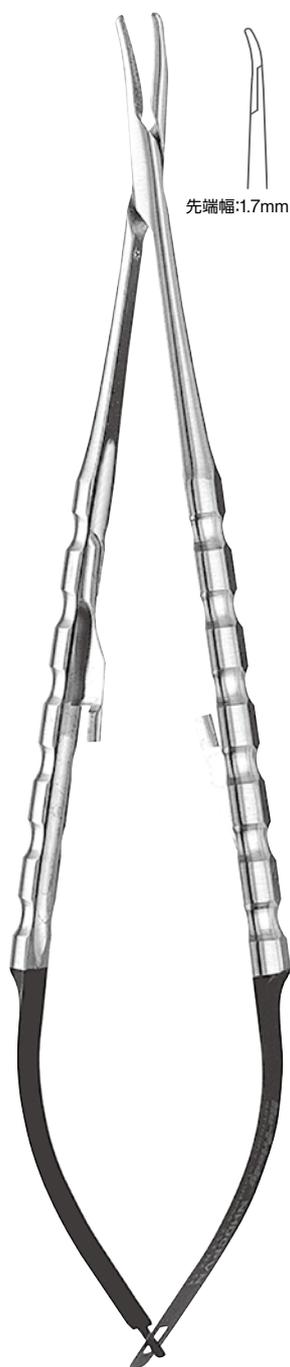

● **マイクロカストロビージョ 曲 DCPVN**
Micro Castroviejo Curved Diamond Dusted
パートコード 標準価格 取寄品
NHDCPVN 86,100 円

全長:18cm
※4-0, 5-0, 6-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



マイクロカストロビージョ 直 5026R
Micro Castroviejo Straight Diamond Dusted
パートコード 標準価格 取寄品
NHM-5026R 73,500 円

全長:18cm
※6-0, 7-0, 8-0, 9-0
ダイヤモンドダスト
ラウンドハンドル



マイクロカストロビージョ スイスペリオ
Swiss Perio Microsurgical
パートコード 標準価格 取寄品
SPNHDPVN 86,100 円

全長:18cm
※6-0, 7-0, 8-0
ヨーロッパハンドルより更に凹凸の少ない
スムーズハンドル



■ 持針器

【ヘガール型】

先端幅: 2.6mm



ヘガーバウムガートナー 5034
Hegar-Baumgartner

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| NH5034 | 31,500 円 | ☺ |

全長:14cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.8mm



● クライルウッド 5038
Crile-Wood

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| NH5038 | 31,500 円 | |

全長:15cm
※3-0, 4-0, 5-0, 6-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.8mm



● ダーフ 5032
Derf

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| NH5032 | 31,500 円 | |

全長:11.5cm
※3-0, 4-0, 5-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.9mm



ホルセイ 5037
Halsey

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| NH5037 | 31,500 円 | |

全長:13cm
※3-0, 4-0, 5-0, 6-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.0mm



マイクロカストロビージョ
直 チタン TMBH

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|-----------|-----|
| NHTMBH | 152,300 円 | |

全長:18cm
※6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



先端幅: 2.6mm



メイヨー・ヘガー 5042

Mayo-Hegar

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| NH5042 | 31,500 円 | |

全長:16cm

※1-0, 2-0, 3-0, 4-0

パーマシャープ

(タングステンカーバイド付)

先端幅: 2.8mm



メイヨー・ヘガー 5044

Mayo-Hegar

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| NH5044 | 31,500 円 | 🕒 |

全長:18cm

※1-0, 2-0, 3-0, 4-0

パーマシャープ

(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.5mm



● **スウェーデンパターン 5052**

Fine Swedish Pattern

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| NH5052 | 39,900 円 | |

全長:15cm

※5-0, 6-0, 7-0, 8-0

パーマシャープ

(タングステンカーバイド付)

先端幅: 3.0mm



オルセンヘガー 5068

Olsen-Hegar

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| NH5068 | 39,900 円 | 🕒 |

全長:17cm

※3-0, 4-0, 5-0, 6-0

パーマシャープ

(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.4mm



● **ギリズ ファイン**

Gillies Fine

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------------|----------|-----|
| NHGILFINE | 31,500 円 | |

全長:15cm

※4-0, 5-0, 6-0

パーマシャープ

(タングステンカーバイド付)

抜歯後の縫合が迅速に行える"はさみ付き持針器"

- はさみが付いているので、縫合後に介助なしで縫合糸をカットできます。
- ロックがないので開閉が容易で素早く縫合できます。
- 細い柄がしなるので、縫合針がしっかり把持できます。
- 人間工学的に3Dデザインされた把持部で、安定して把持しやすいです。

【マシュー型】

先端幅: 2.2mm



マシューコーチャー 5074

Mathieu-Kocher

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| NH5074 | 42,000 円 | |

全長:14cm

※1-0, 2-0, 3-0, 4-0

パーマシャープ

(タングステンカーバイド付)

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

持針器 / マレット
Needle Holders / Mallet



【ジェネラルモデル(パーマシャープ加工なし)】

先端幅: 1.8mm



クライルウッド
Crile-Wood

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| NHCW | 21,000 円 | |

全長:15cm
※3-0, 4-0, 5-0, 6-0
溝付

先端幅: 2.6mm



● マシュー
Mathieu

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| NHM | 31,500 円 | |

全長:14cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0

先端幅: 2.7mm



メイヨ・ヘガー
Mayo-Hegar

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| NHMH | 21,000 円 | |

全長:16cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0
溝付

外科 Surgical



マレット

Mallet

■ マレット



ミード
1 Mead

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| MAL1 | 24,200 円 | |

全長:19cm

※針付縫合糸の推奨サイズ
標準価格は全て税抜価格です。

Osteotomes

オステオトーム

骨を拳上、拡張するために設計されたもので、着脱式と太いハンドルのデザインがあります。



■ オステオトーム



| ジョバノビック 6mm Jovanovic Osteotome 6mm | | |
|--|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| OSTJ08 | 15,400 円 | ☺ |



7-10-13-15-18mm

| オステオトーム 1 2.7mm 1 Osteotome | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| OSTPAL1 | 17,600 円 | ☺ |



7-10-13-15-18mm

| オステオトーム 2 3.2mm 2 Osteotome | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| OSTPAL2 | 17,600 円 | ☺ |



7-10-13-15-18mm

| オステオトーム 3 3.7mm 3 Osteotome | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| OSTPAL3 | 17,600 円 | ☺ |

☺取寄品 取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

■ オステオトーム 着脱式



| 着脱式 共用ハンドル Interchangeable Osteotome Handle | | |
|--|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| OSTMGRIF | 20,000 円 | |



2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm




着脱式 コンベックス テーパー 直
Tapered Convex Tip, Straight

| 径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------|-----------------|---------|-----|
| 2.7mm | OSTMSP27 | 8,400 円 | ☺ |
| 3.2mm | OSTMSP32 | 8,400 円 | ☺ |
| 3.7mm | OSTMSP37 | 8,400 円 | ☺ |
| 4.2mm | OSTMSP42 | 8,400 円 | ☺ |
| 5.0mm | OSTMSP50 | 8,400 円 | ☺ |

サイナスリフトでの側方への骨造成用。先端部は、ソフトボーン対応のコニカルインプラント(3.3~6.5mm)の挿入を可能にします。この丸い先端部により、シュナイダー膜を剥離する際に穿孔が生じるリスクを軽減します。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm

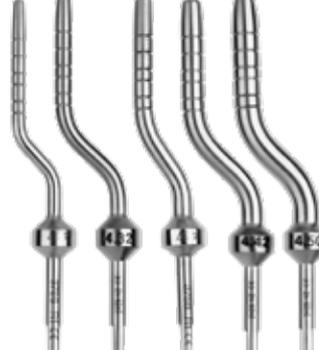

着脱式 コンベックス テーパー 曲
Tapered Convex Tip, Angulated

| 径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------|------------------|---------|-----|
| 2.7mm | OSTMSP27A | 8,400 円 | ☺ |
| 3.2mm | OSTMSP32A | 8,400 円 | ☺ |
| 3.7mm | OSTMSP37A | 8,400 円 | ☺ |
| 4.2mm | OSTMSP42A | 8,400 円 | ☺ |
| 5.0mm | OSTMSP50A | 8,400 円 | ☺ |

上顎骨側壁や上顎のアクセスしにくい部位でのサイナスリフト用。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンベックス 直
Bone Pushers, Slightly Convex Tip, Straight

| 径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------|-----------------|---------|-----|
| 2.7mm | OSTMPU27 | 8,400 円 | ☺ |
| 3.2mm | OSTMPU32 | 8,400 円 | ☺ |
| 3.7mm | OSTMPU37 | 8,400 円 | ☺ |
| 4.2mm | OSTMPU42 | 8,400 円 | ☺ |
| 5.0mm | OSTMPU50 | 8,400 円 | ☺ |

移植材の充填・圧接や上顎洞底での骨造成用。サイナスリフトでの粘膜穿孔が生じるリスクを軽減します。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンケイブ 曲
Bone Pushers, Angled

| 径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------|------------------|---------|-----|
| 2.7mm | OSTMPU27A | 8,400 円 | ☺ |
| 3.2mm | OSTMPU32A | 8,400 円 | ☺ |
| 3.7mm | OSTMPU37A | 8,400 円 | ☺ |
| 4.2mm | OSTMPU42A | 8,400 円 | ☺ |
| 5.0mm | OSTMPU50A | 8,400 円 | ☺ |

移植材の充填・圧接や上顎洞底での骨造成用。サイナスリフトでの粘膜穿孔が生じるリスクを軽減します。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンケイブ テーパー 直
Tapered Concave Tip, Straight

| 径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------|-----------------|---------|-----|
| 2.7mm | OSTMSH27 | 8,400 円 | ☺ |
| 3.2mm | OSTMSH32 | 8,400 円 | ☺ |
| 3.7mm | OSTMSH37 | 8,400 円 | ☺ |
| 4.2mm | OSTMSH42 | 8,400 円 | ☺ |
| 5.0mm | OSTMSH50 | 8,400 円 | ☺ |

インプラント窩から移植骨を移動したり、根尖方向に圧接できます。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンケイブ テーパー 曲
Tapered Concave Tip, Angulated

| 径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------|------------------|---------|-----|
| 2.7mm | OSTMSH27A | 8,400 円 | ☺ |
| 3.2mm | OSTMSH32A | 8,400 円 | ☺ |
| 3.7mm | OSTMSH37A | 8,400 円 | ☺ |
| 4.2mm | OSTMSH42A | 8,400 円 | ☺ |
| 5.0mm | OSTMSH50A | 8,400 円 | ☺ |

インプラント窩から移植骨を移動したり、根尖方向に圧接できます。

Periosteals

剥離子 (ペリオスチール)

組織の把持・保護・排除する際に使用します。

一般的な外科処置に際し、術中に生じる偶発的な損傷を軽減するため、また組織を保護するために使用します。



■ ペリオスチール

掲載画像 P14X



先端幅:5.8mm

先端幅:5.8mm

● **ゴールドマンフォックス 14**

14 Goldman-Fox

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|----------|--------|---------|-----|
| P14X | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |
| P146 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |
| P14 | 9,600 円 | #2 | 角柄 | |

先端幅:6.0mm



先端幅:6.0mm

フリーア 15

15 Freer Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|----------|--------|---------|---|
| P156 | 16,800 円 | #6 | サテンスチール |  |

先端幅:6.0mm



先端幅:6.0mm

フリーア 16

16 Freer Strongly Curved

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|----------|--------|---------|---|
| P166 | 16,800 円 | #6 | サテンスチール |  |

先端幅:3.4mm



先端幅:3.7mm

掲載画像 P206

● **ハーシュフェルト 20**

20 Hirschfeld

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|
| P206 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |
| P20 | 9,600 円 | #2 | 角柄 | |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#2 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

剥離子(ペリオスチール)
Periosteals



外科 Surgical



先端幅:3.0mm

先端幅:3.0mm

| | | | | |
|----------------|---------|--------|---------|-----|
| シシリア 20 | | | | |
| 20 Sicilia | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| P20SIC6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |



先端幅:3.0mm

先端幅:9.0mm

| | | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|-----|
| シシリア 24G | | | | |
| 24G Sicilia | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| P24GSIC6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |



先端幅:4.0mm

先端幅:4.0mm

| | | | | |
|----------------|---------|--------|---------|-----|
| 24G | | | | |
| 24G | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| P24GSP6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |



先端幅:9.0mm

先端幅:2.0mm

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|---------|-----|
| ● スイスペリオ 改良型 P24G | | | | |
| Swiss Perio Periosteal Elevator P24G | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SPP24GSPX | 14,400 円 | BL | ブラックライン | |



先端幅:9.0mm

先端幅:4.2mm

| | | | | |
|---|----------|--------|---------|-----|
| スイスペリオ 改良型 P24GSIC | | | | |
| Swiss Perio Periosteal Elevator P24GSIC | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SPP24GSICX | 14,400 円 | BL | ブラックライン | |



先端幅:2.0mm

先端幅:4.2mm

| | | | | |
|--|----------|--------|---------|-----|
| スイスペリオ 改良型 P24GSP | | | | |
| Swiss Perio Periosteal Elevator P24GSP | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SPP24GSP2X | 14,400 円 | BL | ブラックライン | |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



先端径:約1.3mm

先端幅:2.0mm

| スイスペリオ 改良型 PPSCHLEE | | | | |
|---|----------|--------|---------|--------------------------|
| Swiss Perio Papilla Elevator & Tissue Dissectors PPSCHLEE | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SPPSCHLEEX | 14,400 円 | BL | ブラックライン | <input type="checkbox"/> |



先端幅:3.0mm

先端幅:3.6mm

| スイスペリオ 改良型 PH2 | | | | |
|--|----------|--------|---------|--------------------------|
| Swiss Perio Papilla Elevator & Tissue Dissectors PH2 | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| SPPH2X | 14,400 円 | BL | ブラックライン | <input type="checkbox"/> |



先端幅:5.7mm

先端幅:3.6mm

| 8D | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|-------------------------------------|
| 8D | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| P8D6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | <input checked="" type="checkbox"/> |

掲載画像 P9X



先端幅:8.4mm

先端幅:4.3mm

| ● モルト 9 | | | | |
|------------|----------|--------|---------|--------------------------|
| 9 Molt | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| P9X | 10,800 円 | BL | ブラックライン | <input type="checkbox"/> |
| P96 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | <input type="checkbox"/> |
| P9 | 9,600 円 | #522 | 角柄 | <input type="checkbox"/> |



先端幅:8.0mm

先端幅:4.3mm

| アレン 9A | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|-------------------------------------|
| 9A Allen | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| P9A6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | <input checked="" type="checkbox"/> |

穴は、縫合中に組織を保持するためのものです。



先端幅:8.4mm

先端幅:8.0mm

| ハワード 9H | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|-------------------------------------|
| 9H Howard | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| P9H6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | <input checked="" type="checkbox"/> |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

剥離子(ペリオスチール)
Periosteals



掲載画像 PFIWDS1MKX



先端幅:3.8mm

先端幅:2.2mm



● ミニミー マイクロサージカル

Urban Mini Me Microsurgical

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| PFIWDS1MKX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | ☺ |
| PFIWDS1MK | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |

Dr. Istvan Urbanご考案、ソーセージテクニックのマスターアイテム!



先端幅:2.8mm

先端幅:1.6mm

ホーリガン 2

2 Hourigan

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| PH26 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

掲載画像 PKN152X



先端幅:4.5mm

先端幅:5.0mm

クレイマー・ネビンス 152

152 Kramer-Nevins

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------|----------|--------|---------|-----|
| PKN152X | 10,800 円 | BL | ブラックライン | ☺ |
| PKN1526 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



先端幅:6.7mm

先端幅:3.6mm

クレイマー・ネビンス 1

1 Kramer-Nevins

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| PKN16 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |



先端幅:11mm

先端幅:4.7mm

シミオン

Simion

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-----------|----------|--------|---------|-----|
| PP5590SIM | 14,400 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。

H57

掲載画像 PPAELAX



先端幅:2.0mm

先端幅:2.0mm

● **アレン 前歯用**
Allen Anterior

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------------|----------|--------|---------|-----|
| PPAELAX | 14,400 円 | BL | ブラックライン | |
| PPAELA | 13,700 円 | #6 | サテンスチール | |

掲載画像 PPAELX



先端幅:2.7mm

先端幅:2.7mm

アレン
Allen

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|---------------|----------|--------|---------|-----|
| PPAELX | 14,400 円 | BL | ブラックライン | |
| PPAEL | 13,700 円 | #6 | サテンスチール | |

骨膜下を鈍的に剥離し、粘膜・骨膜を全層分で挙上。

掲載画像 PPAELPX



先端幅:1.4mm

先端幅:1.4mm

アレン 臼歯用
Allen Posterior

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------------|----------|--------|---------|-----|
| PPAELPX | 14,400 円 | BL | ブラックライン | |
| PPAELP | 13,700 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

掲載画像 PPBUSERX



先端幅:4.3mm

先端幅:3.8mm

● **ブーザー**
Buser

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-----------------|----------|--------|---------|-----|
| PPBUSERX | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |
| PPBUSER6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |
| PPBUSER | 9,600 円 | #10 | 丸柄 | |



先端幅:4.3mm

先端幅:2.8mm

ステイグマン スプリッター
Periosteal Splitter Steigmann

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------------|----------|--------|----------|-----|
| PPSTEIG | 14,400 円 | #SS | スムーズハンドル | |

粘膜骨膜の剥離や挙上に使います。
スベード型の先端は、穿孔が生じにくいように丸くなっています。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。
太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。
軽いつけで把持することができるためのハンドル。



#2 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。
8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

剥離子(ペリオスチール)
Periosteals



掲載画像 PPR3X



先端幅:11.0mm

先端幅:4.7mm

● プリチャード PR3

PR-3 Prichard

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|--------|----------|--------|---------|-----|
| PPR3X | 10,800 円 | BL | ブラックライン | |
| PPR36 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |
| PPR3 | 9,600 円 | #522 | 角柄 | ☺ |



先端幅:11.0mm

先端幅:7.8mm

3/9A

3/9A

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|----------|---------|--------|---------|-----|
| PPR3/9A6 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |



先端幅:11.0mm

先端幅:4.0mm

ラバンカ 1

1 Labanca

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| PPLABANCA6 | 14,400 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |



先端幅:4.3mm

先端幅:3.7mm

ラバンカ 改良型 2

2 Labanca Modified

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| PPLABANC26 | 14,400 円 | #6 | サテンスチール | ☺ |

先端幅:11.0mm ギザ付

掲載画像 PPLABANC3X



先端幅:4.0mm

● ラバンカ 改良型 3

3 Labanca Modified

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|---------|-----|
| PPLABANC3X | 15,600 円 | BL | ブラックライン | |
| PPLABANC36 | 14,400 円 | #6 | サテンスチール | |



使いやすい小さめの剥離子と、滑りにくいギザ付きトラクターが対になっています。



先端幅:1.7mm

先端幅:1.7mm

タネラ

Tabanella Interproximal Bone Plugger

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|------------|---------|--------|---------|-----|
| TABANELLA1 | 9,600 円 | #6 | サテンスチール | |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール


作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

標準価格は全て税抜価格です。

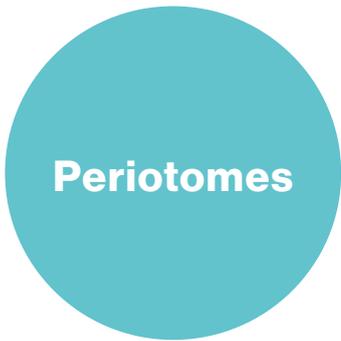

Periotomes

ペリオトーム (歯周靱帯刀)

薄く鋭利な刃で歯周靱帯を切断することで、周囲の歯槽骨への損傷を抑えつつ抜歯を容易にします。



■ ペリオトーム



掲載画像 PT1X

● **1 臼歯用**
1 Posterior


| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|
| PT1X | 7,500 円 | BL | ブラックライン | |
| PT1 | 7,000 円 | #6 | サテンスチール | |



掲載画像 PT2X

● **2 前歯用**
2 Anterior

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|
| PT2X | 7,500 円 | BL | ブラックライン | |
| PT2 | 7,000 円 | #6 | サテンスチール | |

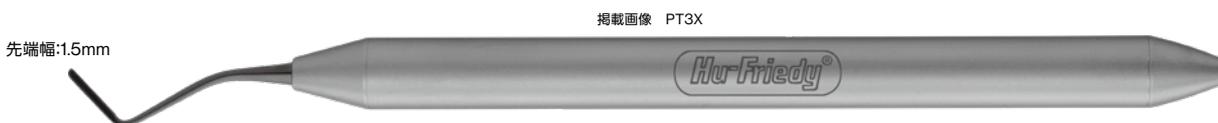

掲載画像 PT3X

● **3 臼歯用**
3 Posterior Right

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|
| PT3X | 7,500 円 | BL | ブラックライン | 🕒 |
| PT3 | 7,000 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

ハンドルの種類




BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

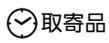

取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ペリオトーム (歯周靱帯刀)

Periotomes



掲載画像 PT4X

先端幅:1.5mm



4 臼歯用

4 Posterior Left

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|
| PT4X | 7,500 円 | BL | ブラックライン | 🕒 |
| PT4 | 7,000 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

掲載画像 PT5X

先端幅:1.5mm



5 前歯用

5 Anterior Angled

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|
| PT5X | 7,500 円 | BL | ブラックライン | 🕒 |
| PT5 | 7,000 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

掲載画像 PT6X

先端幅:3.2mm



6 前歯用

6 Anterior Straight

| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|
| PT6X | 7,500 円 | BL | ブラックライン | 🕒 |
| PT6 | 7,000 円 | #6 | サテンスチール | 🕒 |

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

**Retractors,
Mouth Props &
Gags**

リトラクター／開口器

■ チークリトラクター

粘膜骨膜の剥離や外科的処置の際に、頬・唇・舌を排除するのに使用します。

先端幅: 22.5mm



先端幅: 22.5mm

| ビショップ Bishop | | | |
|-----------------|----------|-----|--|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 | |
| CRB | 13,200 円 | | |
| 全長: 13.5cm | | | |

先端幅: 38mm



先端幅: 50mm

| ● コロンビア Columbia | | | |
|---------------------|---------|-----|--|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 | |
| CRC | 5,800 円 | | |
| 全長: 13.7cm | | | |

先端幅: 20.6mm



先端幅: 20.6mm

| ● ミネソタ大学型 University of Minnesota | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
| CRMX | 5,800 円 | ブラックライン | |
| CRM | 5,800 円 | ステンレススチール | |
| 全長: 14cm | | | |

先端幅: 20.6mm



先端幅: 20.6mm

| アーバン Urban | | | |
|---------------|---------|-----|---|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 | |
| CRURBAN | 5,800 円 | | ☺ |
| 全長: 13.8cm | | | |

先端幅: 20.5mm



先端幅: 20.5mm

| ケーウッド・ミネソタ Cawood Minnesota | | | |
|--------------------------------|---------|-----|--|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 | |
| CRM2 | 5,800 円 | | |
| 全長: 15cm | | | |

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

リトラクター / 開口器 Retractors, Mouth Props & Gags



先端幅:30mm




先端幅:14mm

| ウェイダー S Weider Cheek & Tongue Retractor | | |
|--|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| CRW1 | 11,000 円 | ☺ |

全長:12.7cm

先端幅:115mm

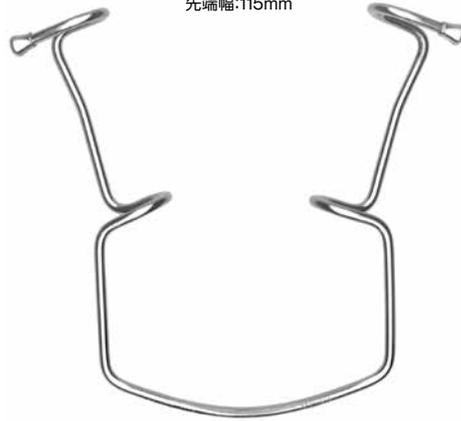

| オーリンガー 2 Orringer Retractors | | |
|---------------------------------|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| CRO2 | 15,400 円 | |

ミディアム
ハンズフリーで使用できます。
全長:10.6cm

先端幅:10mm



先端幅:15mm



先端幅:20mm



| ラバンカ 3入 Labanca Malleable Retractors, set of 3 | | |
|---|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| CRLABANCA | 13,200 円 | |

術式や状況に応じて粘膜・頬・舌などの排除を容易に行える変形可能なリトラクターです。
ギザ付
全長:20cm

ティッシュリトラクター



先端幅:15.0mm

| サイナスリトラクターSGRT Sinus Retractor | | |
|-----------------------------------|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| SGRT | 13,200 円 | ☺ |

■ サージカルリトラクター

外科 Surgical



サージカルリトラクターインプラント用
Implant Retractor

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| IR | 33,000 円 | ☺ |

先端開口幅: 70~90mm
全長: 23cm



サージカルリトラクターミドルドーフ
Middeldorf Retractor

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| RSMID1 | 25,300 円 | ☺ |

先端幅: 17mm
全長: 22cm



サージカルリトラクター 1
1 Surgical Retractor

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| SR1 | 19,800 円 | ☺ |

先端サイズ: 7×28mm
全長: 22cm

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、
お届けまでに時間を要します。
予めご了承ください。

リトラクター／開口器
Retractors, Mouth Props & Gags



外科 Surgical



● **サージカルリトラクター 2**
2 Surgical Retractor
パートコード 標準価格 取寄品
SR2 19,800 円

先端サイズ: 10×46mm
全長: 22cm

サージカルリトラクター 3
3 Surgical Retractor
パートコード 標準価格 取寄品
SR3 19,800 円

先端サイズ: 12×60mm
全長: 22cm



サージカルリトラクター 8
8 Surgical Retractor
パートコード 標準価格 取寄品
SR8 19,800 円 ☺

先端サイズ: 15×83mm
全長: 23cm



サージカルリトラクターラムス 9
9 Ramus Retractor
パートコード 標準価格 取寄品
SR9 19,800 円 ☺

先端サイズ: 11×73mm
全長: 22cm

Rongeurs

骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織除去に使用します。

骨鉗子

先端幅:3.5mm



| | | | |
|---|--|----------|-----|
| ● | バイヤーダブルアクション Beyer Double Action | | |
| | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| | RBEY | 68,200 円 | |

全長:18cm
ダブルアクションの骨鉗子は、てこの作用を利用し、軽い力で握ることができ、時間の節約にもつながります。

先端幅:2.4mm



| | | | |
|--|---------------------------|----------|-----|
| | フリードマン Friedman | | |
| | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| | RF | 44,100 円 | |

全長:14cm
線維性組織または小骨片の整形用

先端幅:1.5mm



| | | | |
|---|----------------------------------|----------|-----|
| ● | ミニフリードマン Mini Friedman | | |
| | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| | RMF | 44,100 円 | |

全長: 14.5cm
線維性組織または小骨片の整形用

先端幅:2.8mm



| | | | |
|--|------------------------------------|----------|-----|
| | クレイマー・ネビンス Kramer-Nevins | | |
| | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| | RKN | 57,800 円 | |

全長:14.5cm

先端幅:4.0mm



| | | | |
|--|--------------------------------|----------|-----|
| | ヒューフレディ1 1 Hu-Friedy | | |
| | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| | R1 | 44,100 円 | |

全長:16.5cm

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ルートチップエレベーター
Root Tip Picks



外科 Surgical

Root Tip Picks

ルートチップエレベーター

■ ルートチップエレベーター



先端幅:1.7mm


● **ハイドブリンク 1**

1 Heidbrink

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|---------|-----|
| EHB1 | 8,000 円 | |




先端幅:1.7mm

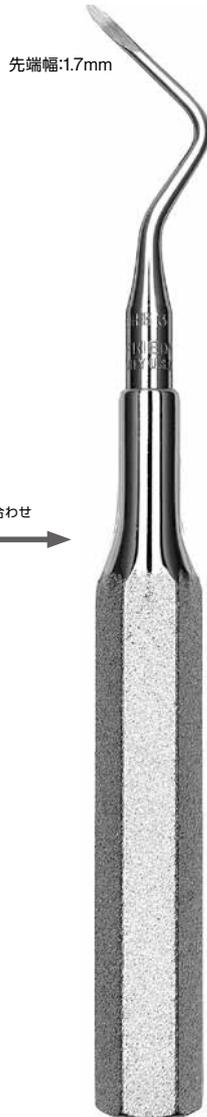

先端幅:1.7mm



先端幅:1.7mm

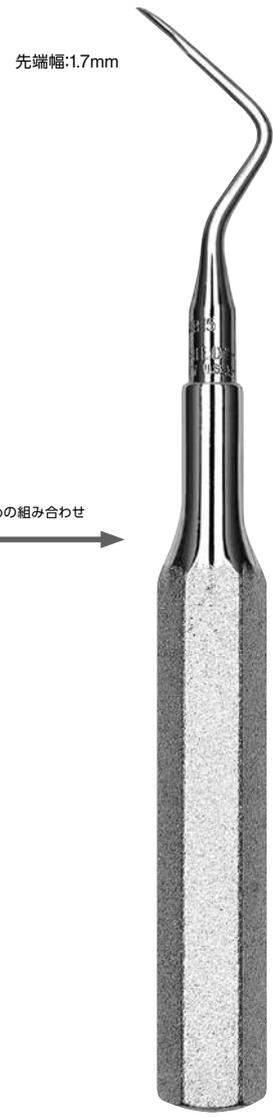

先端幅:1.7mm

おすすめ組み合わせ

おすすめ組み合わせ

● **ハイドブリンク 2**

2 Heidbrink

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|---------|-----|
| EHB2 | 8,000 円 | |

● **ハイドブリンク 3**

3 Heidbrink

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|---------|-----|
| EHB3 | 8,000 円 | |

ハイドブリンク 4

4 Heidbrink

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|---------|-----|
| EHB4 | 8,000 円 | 🕒 |

ハイドブリンク 5

5 Heidbrink

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|---------|-----|
| EHB5 | 8,000 円 | 🕒 |

標準価格は全て税抜価格です。

H67



先端幅:1.4mm


| ハイドブリンク 13/14 | | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|-----|
| 13/14 Heidbrink | | | | |
| パートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドル名 | 取寄品 |
| EHB13/146 | 8,800 円 | #6 | サテンスチール | ☑ |

■ **ハウード**



先端幅:2.3mm

| ハウード1 | | |
|----------|---------|-----|
| 1 Howard | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| EHO1 | 8,000 円 | |

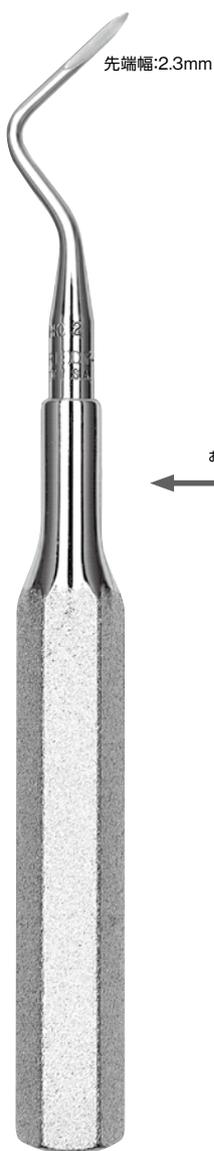

先端幅:2.3mm

おすすめの組み合わせ



先端幅:2.3mm



先端幅:2.3mm

| ハウード2 | | |
|----------|---------|-----|
| 2 Howard | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| EHO2 | 8,000 円 | |

| ハウード3 | | |
|----------|---------|-----|
| 3 Howard | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| EHO3 | 8,000 円 | |

| ハウード 2/3 | | |
|------------|---------|-----|
| 2/3 Howard | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| EHO2/36 | 8,800 円 | ☑ |



Scalpel Handles

メスハンドル

ヒューフレディグループ製スカルペルハンドルは、バランスのとれたデザインが特徴で操作性が高く耐久性に優れています。


■ スカルペルハンドル



● ヨーロッパスタイル 5E
5 Round Straight, European Style

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------|----------|-----|
| 10-130-05E | 11,700 円 | |

バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。またシンプルなデザインのグリップは、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。

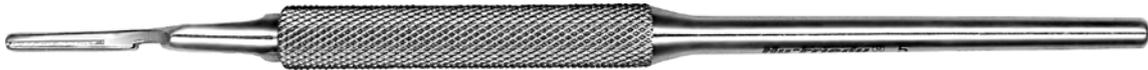

5
5 Round Straight

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-----------|----------|-----|
| 10-130-05 | 11,700 円 | |


バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。



5A
5 Round Angulated

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------|----------|-----|
| 10-130-05A | 11,700 円 | |

角度のついたデザインは臼歯部や口蓋側に適用

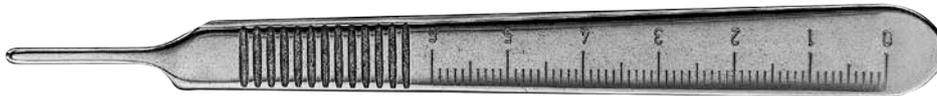

3
3

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-----------|---------|-----|
| 10-130-03 | 4,200 円 | |

ミリ単位の目盛がついたバードパーカースタイルです。



7K
7K

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------|---------|-----|
| 10-130-07K | 7,300 円 | 🕒 |

■ スカルペルハンドル ミニブレード用

スカルペルハンドル ミニブレード用は、マイクロブレードやマイクロミラーの装着に使用します。



| ● ミニブレード用 | | |
|--|----------|-----|
| Mini Scalpel Blade/Mirror Handle Stainless Steel | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| SHDPV | 28,600 円 | |

ブレード締め機能付




| ミニブレード用 テタン | | |
|---|----------|-----|
| Mini Scalpel Blade/Mirror Handle Titanium | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| SHTMBH | 35,200 円 | 🕒 |

ブレード締め機能付




| ミニブレード用 7 | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| #7 Mini Scalpel Blade/Mirror Handle | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| 10-130-70 | 7,300 円 | |

■ ブレードハンドル

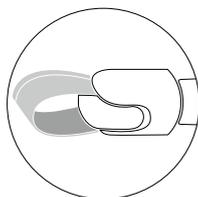

| パケット | | |
|------------------------|----------|-----|
| Paquette Palatal Knife | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| KPQ | 42,900 円 | 🕒 |

移殖歯内の採取、口蓋部の手術や弓形ブレードを使用するのに適しています。両刃のブレードを半分にかuttingして片刃のみを使用します。ブレードを左の図のように差し込み、ハンドルの後ろのネジを回すと、保持部が締まりブレードが固定されます。
※ブレードは市販のカミソリの刃をご使用ください（ヒューフレディグループでは取扱っていません）。

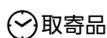

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Scissors

はさみ


タングステンカーバイドが付与された「パーマシャープ」、黒色コーティングが施された「ブラックライン」、滑らかな切り口が特徴の「スーパーカット」、
「スタンダード」など、様々なラインナップがあります。



パーマシャープ (金色のハンドル)

Perma Sharp™


2本の先端の刃先にタングステンカーバイド(超硬)のブレードを付与、滑らかな切れ味と高い耐久性が特徴。

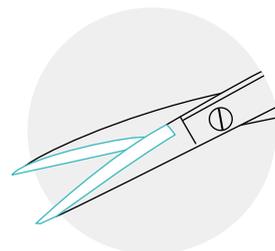

ブラックライン (黒色のデザイン・金色のスクリュー)

Black Line


高性能なマット仕上げの黒色コーティング加工が特徴。鋭利さと耐久性を強化すると共に、より強いライトの下でも乱反射を抑制し、術中により良い視野を確保します。歯周組織への損傷を抑える滑らかな切り口が特徴の「スーパーカット」デザイン。

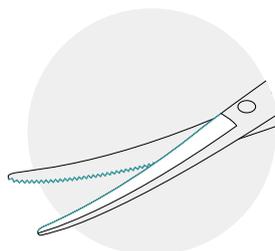

スーパーカット (片方のみ金色のハンドル)

Super-Cut

歯周組織への損傷を抑える滑らかな切り口になっており、かみそりの刃のようなブレードの一方は細かなギザ付、もう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、すべりを防止しながら組織を除去できます。

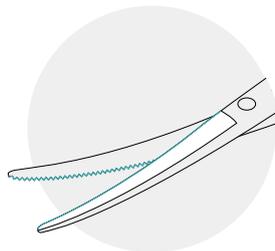

スタンダード (シルバーハンドル)


Standard Series

高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。数種類はギザ付になっており、歯肉・粘膜を把持しやすいデザイン。



■ はさみ マイクロカストロビージョ

損傷の発生を抑制しながら、組織を滑らかに切除できます。

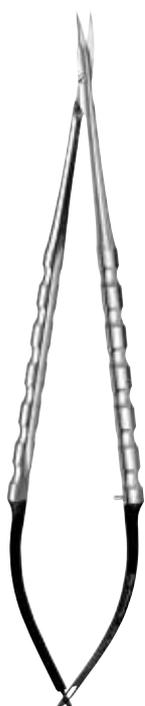

● **マイクロカストロビージョ 曲 PV**
Castroviejo Microsurgical Scissors, Curved
PV

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| SPV | 77,500 円 | |

全長:18cm
ヨーロッパハンドル



ブラックラインスーパーカットマイクロカストロビージョ 曲 PV
Castro Microsurgical, Super-Cut
PV

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| SPVX | 86,300 円 | |

全長:18cm
ヨーロッパハンドル



マイクロカストロビージョ 曲チタン
Castroviejo Microsurgical Scissors, Curved, Titanium

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|-----------|-----|
| STMBH | 136,500 円 | ☺ |

全長:18cm
ヨーロッパハンドル



マイクロカストロビージョ スイスペリオ
Swiss Perio Microsurgical Scissors

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| SPSPV | 77,500 円 | |

全長:18cm
スムーズハンドル
軟組織の細かい切除や、術野マージンや移植用粘膜炎のトリミングに使用する、ややカーブした鋭利な作業端をもつ微細組織用はさみです。



マイクロカストロビージョ スイスペリオ 45°
Swiss Perio Microsurgical Scissors, 45°

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------|----------|-----|
| SPSPV45 | 86,300 円 | |

全長:18cm
スムーズハンドル
作業端に傾きをもたせることで、大白歯部における遠心部の難しい部分にも容易にアクセス可能なデザイン。



カストロビージョ 31
31 Castroviejo, Curved

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| S31 | 48,300 円 | |

全長:10cm



■ はさみ パーマシャープ (Perma Sharp™)



ロックリン 曲 5011

Locklin Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|----------|---------|-----|
| S5011 | 44,100 円 | パーマシャープ | |

全長:16.5cm

ギザ付ブレード1枚



メツェンバウム 曲 ブラント 5055

Metzenbaum, Curved Blunt

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|----------|---------|-----|
| S5055 | 44,100 円 | パーマシャープ | ☺ |

全長:14.5cm



メツェンバウム 曲 ポイント 5057

Metzenbaum, Curved Pointed

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|----------|---------|-----|
| S5057 | 44,100 円 | パーマシャープ | ☺ |

全長:14.5cm



ゴールドマンフォックス 直 5080

Goldman-Fox, Straight

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|----------|---------|-----|
| S5080 | 44,100 円 | パーマシャープ | |

全長:13cm

ギザ付ブレード1枚

隣接面での使用に適用



● **ゴールドマンフォックス 曲 5081**

Goldman-Fox, Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|----------|---------|-----|
| S5081 | 44,100 円 | パーマシャープ | |

全長:13cm

ギザ付ブレード1枚

隣接面での使用に適用



アイリス直 5082

Iris, Straight

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|---------|---------|-----|
| S5082 | 44,100円 | パーマシャープ | |

全長:11.5cm
ギザなし

● **アイリス曲 5083**

Iris, Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|---------|---------|-----|
| S5083 | 44,100円 | パーマシャープ | |

全長:11.5cm
ギザなし

■ はさみ



掲載画像 S10SC

ヒューフレディ曲 10

10 Hu-Friedy Double-Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|---------|---------|-----|
| S10SC | 23,100円 | スーパーカット | ☺ |
| S10 | 16,800円 | スタンダード | ☺ |

全長:13.5cm
ギザ付ブレード1枚



掲載画像 S14SCX

● **ラグランジュ曲 14**

14 LaGrange, Double-Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|---------------|---------|---------|-----|
| S14SCX | 27,300円 | ブラックライン | |
| S14SC | 23,100円 | スーパーカット | |
| S14 | 16,800円 | スタンダード | |

全長:11.5cm
ギザ付ブレード1枚
臼歯部にも届きやすい複屈曲型



はさみの種類



パーマシャープ
2本の先端の刃先にタンクステンカーバイド(超硬)のブレードを付与、滑らかな切れ味と高い耐久性が特徴。



ブラックライン
高性能なマット仕上げの黒色コーティング加工が特徴。鋭利さと耐久性を強化すると共に、より強いライトの下でも乱反射を抑制し、術中により良い視野を確保。



スーパーカット
一方は細やかなギザ付で、もう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、すべりを防止しながら組織を切除。



スタンダード
高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



掲載画像 S16SCX



掲載画像 S17SCX



掲載画像 S18SCX

● **ゴールドマンフォックス 曲 16**

Goldman-Fox, Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|---------------|----------|---------|-----|
| S16SCX | 27,300 円 | ブラックライン | |
| S16SC | 23,100 円 | スーパーカット | |
| S16 | 16,800 円 | スタンダード | |

全長:13.5cm(ブラックライン)
全長:12.5cm(スーパーカット、スタンダード)
ギザ付ブレード1枚
隣接面での使用に適用

アイリス 直 17

17 Iris, Straight/Delicate

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|---------------|----------|---------|-----|
| S17SCX | 27,300 円 | ブラックライン | |
| S17SC | 18,900 円 | スーパーカット | |
| S17 | 14,700 円 | スタンダード | |

全長:11.5cm
ギザ付ブレード1枚(ブラックライン、スーパーカット)
ギザなし(スタンダード)

● **アイリス 曲 18**

18 Iris, Curved/Delicate

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|---------------|----------|---------|-----|
| S18SCX | 27,300 円 | ブラックライン | |
| S18SC | 18,900 円 | スーパーカット | |
| S18 | 14,700 円 | スタンダード | |

全長:11.5cm
ギザ付ブレード1枚(ブラックライン、スーパーカット)
ギザなし(スタンダード)



ブラックラインスーパーカットメツゼンバウム

19 Metzenbaum, Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|---------------|----------|---------|-----|
| S19SCX | 27,300 円 | ブラックライン | |

全長:14.25cm
ギザ付ブレード1枚



ブラックラインスーパーカットゴールドマンフォックス直

20 Goldman-Fox, Straight

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|---------------|----------|---------|-----|
| S20SCX | 27,300 円 | ブラックライン | |

全長:13.5cm
ギザ付ブレード1枚



掲載画像 SCORTSC

コーテリニ 曲

Cortellini Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|----------------|----------|---------|-----|
| SCORTSC | 18,900 円 | スーパーカット | |
| SCORT | 14,700 円 | スタンダード | |

全長:12cm
ギザ付ブレード1枚

はさみの種類



ブラックライン

高性能なマット仕上げの黒色コーティング加工が特徴。鋭利さと耐久性を強化すると共に、より強いライトの下でも乱反射を抑制し、術中により良い視野を確保。



スーパーカット

一方は細やかなギザ付でもう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、すべりを防止しながら組織を切除。



スタンダード

高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。



ケリー 1
1 Kelly, Curved Pointed

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|-----------|----------|--------|-----|
| S1 | 16,800 円 | スタンダード | |


全長:16cm



ワグナー 直 5
5 Wagner, Straight Pointed

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|-----------|----------|--------|-----|
| S5 | 14,700 円 | スタンダード | |

全長:11.5cm

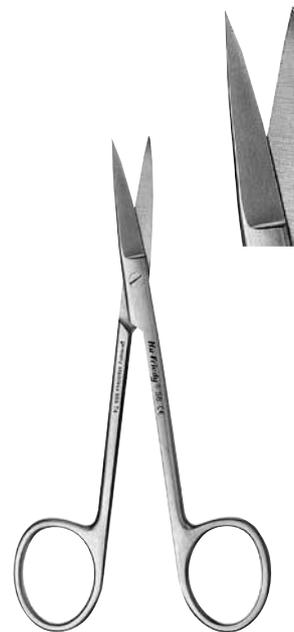

ワグナー 曲 6
6 Wagner, Curved Pointed

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|-----------|----------|--------|-----|
| S6 | 14,700 円 | スタンダード | |

全長:11.5cm



ディーン 9
9 Dean

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|-----------|----------|--------|-----|
| S9 | 16,800 円 | スタンダード | ☺ |

全長:16.5cm



ロックリン 直 12
12 Locklin

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|-----|
| S12 | 16,800 円 | スタンダード | ☺ |

全長:16cm



一般外科用 直 21
21 Surgical, Straight Pointed

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|------------|----------|--------|-----|
| S21 | 14,700 円 | スタンダード | ☺ |

全長:14.5cm

はさみの種類



スタンダード
高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

■ はさみ 縫合用



メツェンバウムベビー
Metzenbaum Baby

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|------------|---------|--------|-----|
| SMB | 16,800円 | スタンダード | ☺ |

全長:12.5cm



● **ヒューフレディ 13S**
13S Hu-Friedy, Suture

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|-----|
| S13S | 16,800円 | スタンダード | ☺ |

全長:12cm



ヒューフレディ 13
13 Hu-Friedy, Suture

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|------------|---------|--------|-----|
| S13 | 16,800円 | スタンダード | ☺ |

全長:15cm

外科 Surgical

■ はさみ 金冠用



金冠用 直
Crown & Gold Straight

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|-----|
| SCGS | 12,600円 | スタンダード | ☺ |

全長:12cm



金冠用 曲
Crown & Gold Curved

| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|-------------|---------|--------|-----|
| SCGC | 12,600円 | スタンダード | ☺ |

全長:12cm



金冠用 小児用 曲
Crown & Gold, Curved Pedro


| パートコード | 標準価格 | 仕様 | 取寄品 |
|--------------|---------|--------|-----|
| SCGCP | 12,600円 | スタンダード | ☺ |

全長:8.8cm

はさみの種類



スタンダード
高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。

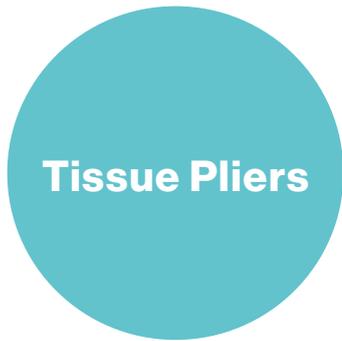

外科用ピンセット (ティッシュプライヤー/撮子)

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。



■ ティッシュプライヤー マイクロ



先端幅:0.8mm



先端幅:0.6mm



先端幅:0.7mm



先端幅:0.7mm

| | | |
|---|----------|-----|
| マイクロダイヤモンドダスト直 905DD | | |
| Plain Straight Diamond Dusted Stainless Steel | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| 8-905DD | 58,800 円 | |
| 全長:18cm ダイヤモンドダスト | | |

| | | |
|---|----------|-----|
| ● マイクロダイヤモンドダスト DAPV 直 無鉤 | | |
| Plain Straight Diamond Dusted Stainless Steel | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TPDAPV | 58,800 円 | |
| 全長:18cm ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル | | |

| | | |
|---|----------|-----|
| ● マイクロ LCOSM 直 マルチ | | |
| Multiple Teeth Straight Stainless Steel | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TPSLCOSM | 58,800 円 | |
| 全長:18cm ヨーロッパハンドル | | |

| | | |
|---------------------------------------|----------|-----|
| マイクロ LCOCMN 曲 マルチ | | |
| Multiple Teeth Curved Stainless Steel | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TPSLCOCMN | 58,800 円 | |
| 全長:18cm ヨーロッパハンドル | | |

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

外科用ピンセット(ティッシュプ라이어/撮子)

Tissue Pliers



外科 Surgical



先端幅:0.5mm



先端幅:0.6mm



先端幅:0.6mm



先端幅:0.7mm

● **マイクロ スイスペリオ**
Microsurgical Pliers, Swiss Perio, Plain

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|----------------|----------|-----|
| SPTDAPV | 58,800 円 | |

全長:18cm
無鉤
スムーズハンドル

マイクロ スイスペリオ アナトミカル
Microsurgical Pliers, Swiss Perio, 1x2

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-----------------|----------|-----|
| SPTDSSPV | 58,800 円 | |

全長:18cm
有鉤
スムーズハンドル

マイクロチタン ASTMBH 直 無鉤
Plain Straight Titanium

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-----------------|-----------|-----|
| TPASTMBH | 115,500 円 | |

全長:18cm
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

マイクロチタンダイヤモンドダスト STMBH 直 有鉤
1x2 Diamond Dusted Titanium

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-----------------|-----------|-----|
| TPSSTMBH | 115,500 円 | 🕒 |

全長:18cm
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

標準価格は全て税抜価格です。



■ ティッシュプライヤー パーマシャープ (Perma Sharp™)



● **アドソン 5041 無鉤**
Adson

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| TP5041 | 26,300 円 | |

 全長:12cm
 パーマシャープ(タングステンカーバイド付)



● **アドソン 5042 有鉤**
Adson 1x2

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| TP5042 | 29,400 円 | |

 全長:12cm
 パーマシャープ(タングステンカーバイド付)



アドソンブラウン 5043 マルチ
Adson-Brown

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|---------------|----------|-----|
| TP5043 | 30,500 円 | ☺ |

 全長:12cm
 パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

外科用ピンセット(ティッシュプライヤー/撮子)

Tissue Pliers



外科 Surgical

先端幅:1.2mm



先端幅:1.2mm



先端幅:2.0mm



先端幅:2.0mm



ジェラルド 5050 無鉤

| ジェラルド | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------------------|----------|-----|
| パートコード TP5050 | 40,800 円 | |

全長:18cm
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

ジェラルド 5051 有鉤

| ジェラルド 1x2 | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------------------|----------|-----|
| パートコード TP5051 | 41,800 円 | 🕒 |

全長:18cm
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

● **ジェネラル 5070 無鉤**

| ジェネラル | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------------------|----------|-----|
| パートコード TP5070 | 26,300 円 | |


全長:15cm
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

ドベイキー 5090 マルチ

| ドベイキー, Multiple Teeth | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------------------|----------|-----|
| パートコード TP5090 | 38,900 円 | |

全長:15cm
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

■ ティッシュプライヤー

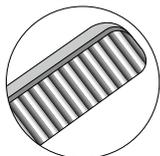

先端幅:1.3mm




| | | |
|-------------------------|----------|-----|
| セムキンテイラー 31 直 無鉤 | | |
| 31 Semkin Taylor | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TP31 | 10,800 円 | |
| 全長:12.5cm | | |




先端幅:1.3mm




| | | |
|-------------------------|----------|-----|
| セムキンテイラー 32 曲 無鉤 | | |
| 32 Semkin Taylor | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TP32 | 10,800 円 | |
| 全長:12.5cm | | |

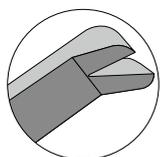

先端幅:1.3mm

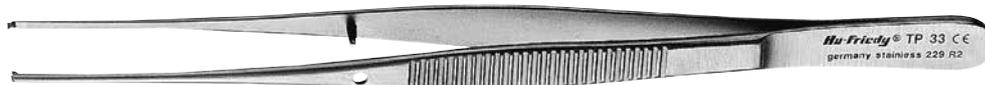


| | | |
|-------------------------|----------|-----|
| セムキンテイラー 33 直 有鉤 | | |
| 33 Semkin Taylor 1x2 | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TP33 | 10,800 円 | |
| 全長:12.5cm | | |

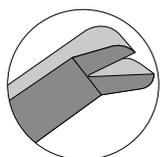

先端幅:1.3mm




| | | |
|-------------------------|----------|-----|
| セムキンテイラー 34 曲 有鉤 | | |
| 34 Semkin Taylor 1x2 | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TP34 | 10,800 円 | |
| 全長:12.5cm | | |

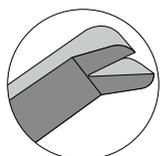

先端幅:1.2mm




| | | |
|--------------------------|----------|-----|
| クレイマー・ネビンス 曲 有鉤 | | |
| Kramer-Nevins Curved 1x2 | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TPKN | 12,600 円 | ☺ |
| 全長:12.5cm | | |

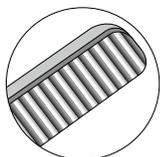


先端幅:1.3mm



| | | |
|---------------------|----------|-----|
| ● アドソン 41 無鉤 | | |
| 41 Adson Plain | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TP41 | 10,800 円 | |
| 全長:12cm | | |

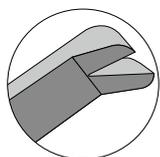

先端幅:1.3mm

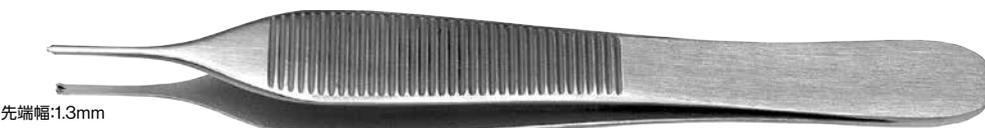

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| ● アドソン 42 有鉤 | | |
| 42 Adson 1x2 | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| TP42 | 10,800 円 | |
| 全長:12cm | | |

● おすすめ品

☺ 取寄品


取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

外科用ピンセット(ティッシュプライヤー/撮子)

Tissue Pliers



外科 Surgical

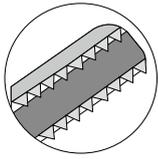

先端幅:1.9mm



アドソンブラウン 43 マルチ

43 Adson Brown 7x7

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| TP43 | 13,700 円 | |

全長:12cm



先端幅:3.0mm



フォックス 50L ロック式

50-L Fox Locking 3x3

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| TP50L | 17,900 円 | ☺ |

全長:15cm

先端幅:1.3mm

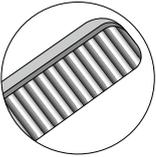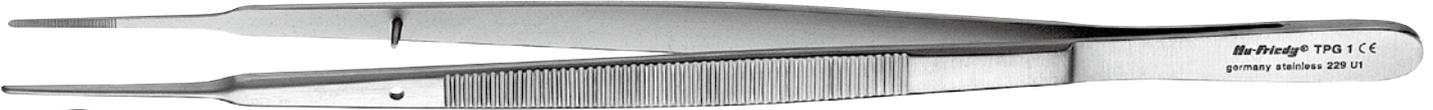


先端幅:1.3mm

ジェラルド 1 無鉤

Gerald Straight/Serrated Plain

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| TPG1 | 13,700 円 | |

全長:18cm

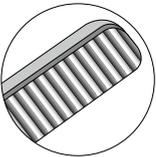


ジェラルド 3 有鉤

Gerald, 1X2

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| TPG3 | 13,700 円 | ☺ |

全長:18cm

縫合用プライヤー

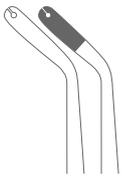


● コーン

#20 Corn

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| SP20 | 13,500 円 | |

全長:15.5cm

先端部の内径:1.2mm

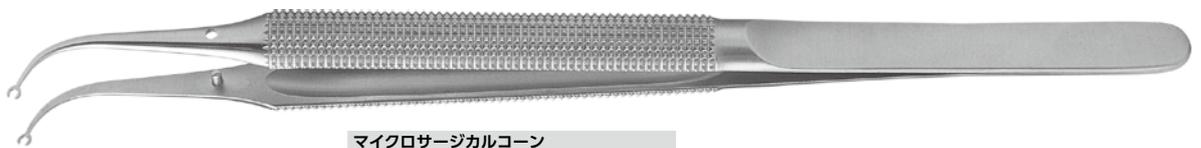

マイクロサージカルコーン

Micro Surgical

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|--------|----------|-----|
| SPM20 | 56,700 円 | ☺ |

全長:15cm

先端部の内径:1.0mm

ダイヤモンドダスト

ティッシュニッパー／タオルクランプ

Tissue Nippers & Towel Clamps

■ ティッシュニッパー



シュガーマン ニプロ
 Sugarman Nipro
 パートコード 標準価格 取寄品
NIPRO 26,300 円
 全長:16cm



ゴールドマンフォックス
 Small Goldman-Fox
 パートコード 標準価格 取寄品
NIPS 26,300 円

全長:10cm
 軟組織への外科的アプローチ時に、歯間部の歯肉整形が適切に行えるよう滑らかに操作できる鋭利な小型ニッパーです。1か所の手術部位で2種類以上の処置を付加するための、貴重な補助ツールでもあります。


■ タオルクランプ



バックハウス 3
 3 Backhaus
 パートコード 標準価格 取寄品
TC3 12,600 円
 全長:9cm



バックハウス 5
 5 Backhaus
 パートコード 標準価格 取寄品
TC5 12,600 円
 全長:12.5cm

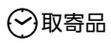

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Wire Cutting Scissors

ワイヤーカッティングシザーズ

■ ワイヤーカッティングシザーズ



ワイヤーカッティングシザーズ アングル

Wire Cutting Scissors, Angled

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|------------|----------|-----|
| WCS | 23,100 円 | |

全長:12cm
【切断許容径】～.015"



ワイヤーカッティングシザーズ スミス

Wire Cutting Scissors, Smith

| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
|-------------|----------|-----|
| WCSS | 23,100 円 | ☺ |

全長:15.3cm
【切断許容径】～.015"

Aspirators

アスピレーター

人間工学的なデザインと様々な先端径のバリエーションにより口腔内の視野を妨げずに骨片や組織片を除去します。

■ アスピレーター



| バード セルフクリーニング Byrd Self-Cleaning | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|-----|
| 製品名 | 先端内径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| B1 | ○ 1.5mm | ASPB1 | 30,800 円 | ☺ |
| B2 | ○ 2mm | ASPB2 | 30,800 円 | ☺ |
| B3 | ○ 2.5mm | ASPB3 | 30,800 円 | ☺ |

シリコンチューブアダプター入
全長:21.5cm



| オーラルサージェリー Oral Surgery | | | | |
|----------------------------|-------|---------------|---------|-----|
| 製品名 | 先端内径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| 1 | ○ 1mm | ASPOS1 | 9,900 円 | ☺ |
| 2 | ○ 2mm | ASPOS2 | 9,900 円 | ☺ |
| 3 | ○ 3mm | ASPOS3 | 9,900 円 | ☺ |
| 4 | ○ 4mm | ASPOS4 | 9,900 円 | ☺ |

シリコンチューブアダプター入
全長:23cm



| クーブランドチップ Coupland Tips | | | | |
|----------------------------|---------|---------------|---------|-----|
| 製品名 | 先端内径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| 1 | ○ 1.5mm | ASPCT1 | 3,600 円 | ☺ |
| 2 | ○ 2mm | ASPCT2 | 3,600 円 | ☺ |
| 3 | ○ 2.5mm | ASPCT3 | 3,600 円 | ☺ |
| 4 | ○ 3mm | ASPCT4 | 3,600 円 | ☺ |

全長:9cm

| クーブランドチップ 横穴付 Coupland Tips /Side Holes | | | | |
|--|---------|----------------|---------|-----|
| 製品名 | 先端内径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| 1 | ○ 1.5mm | ASPCT1W | 3,600 円 | ☺ |
| 2 | ○ 2mm | ASPCT2W | 3,600 円 | ☺ |
| 3 | ○ 2.5mm | ASPCT3W | 3,600 円 | ☺ |
| 4 | ○ 3mm | ASPCT4W | 3,600 円 | ☺ |

全長:9cm

| ハンドル コーブランド Coupland Handle | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-----|
| 製品名 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| ハンドル | ASPCH | 17,600 円 | ☺ |

シリコンチューブ付
全長:17cm




取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

アスピレーター
Aspirators



外科 Surgical

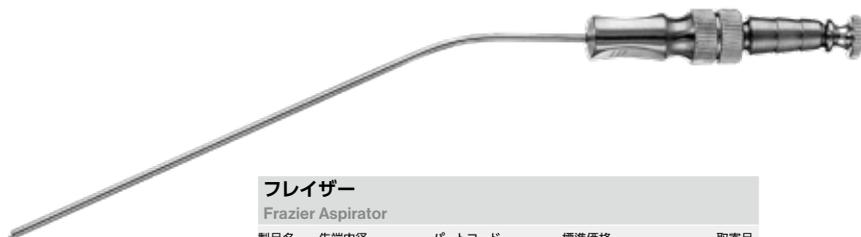

| フレイザー Frazier Aspirator | | | | |
|----------------------------|---------|----------------|----------|-----|
| 製品名 | 先端内径 | パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| 6 | ○ 1.5mm | ASPFR6 | 12,600 円 | ☺ |
| 8 | ○ 2mm | ASPFR8 | 12,600 円 | ☺ |
| 10 | ○ 2.5mm | ASPFR10 | 12,600 円 | ☺ |
| 12 | ○ 3mm | ASPFR12 | 12,600 円 | ☺ |

チップから骨片などを除去するワイヤー製スティレット付
全長:18cm



| アスピレーター スティレット Stylette for Frazier Aspirator | | | |
|--|------|---------|-----|
| パートコード | 仕様 | 標準価格 | 取寄品 |
| PTFS | | 5,300 円 | ☺ |
| PTFSB | ボール付 | 5,300 円 | ☺ |

アスピレーター フレイザー 清掃用
全長:21cm



| コグスウェル 3 3 Cogswell | | |
|------------------------|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| ASPCG3 | 12,600 円 | ☺ |

先端内径:2.3mm
全長:24cm



| アンドリュウ・パイション Andrew-Pychon Aspirator | | |
|---|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| ASPA | 12,600 円 | ☺ |

先端内径:1.8mm (先端径:6mm)
全長:23cm



| ヤンカー・トンシル Yankauer Tonsil Aspirator | | |
|--|----------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| ASPY | 13,500 円 | ☺ |

先端内径:2mm (先端径:10mm)
全長:30.5cm
シリコンチューブアダプター付



| アダプター Aspirator Adaptor | | |
|----------------------------|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| PTAA | 3,600 円 | ☺ |

ヒューフレディグループ製アスピレーター用アダプター
全長:34mm
直径:11mm

| 交換用シリコンチューブ 4フィート 4ft Long Silicone Replacement Tuing | | |
|--|---------|-----|
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| PTRTCL | 6,400 円 | ☺ |

4フィート(120cm)



シリンジ／ボーンキャリパス

Syringes

■ アスピレーティングシリンジ

ヒューフレディグループ製のシリンジは操作性向上のために太いフィンガーリングを備え、ガラスアンプルが見やすいように窓部分を大きくし、カートリッジの着脱を容易に行えるように金具が付けられています。



| | | |
|--|---------|-----|
| タイプCW | | |
| Cook-Waite Anesthetic Aspirating Syringe | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| SYRCW | 8,600 円 | |


■ ボーングラフトシリンジ



| | | |
|--------------------------|----------|-----|
| ● ボーングラフトシリンジ 7mm | | |
| Bone Grafting Syringe | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| SYBG | 26,400 円 | |

外径:7mm
内径:5.8mm
目詰まりを防ぐため、先端から充填します。

■ ボーンキャリパス

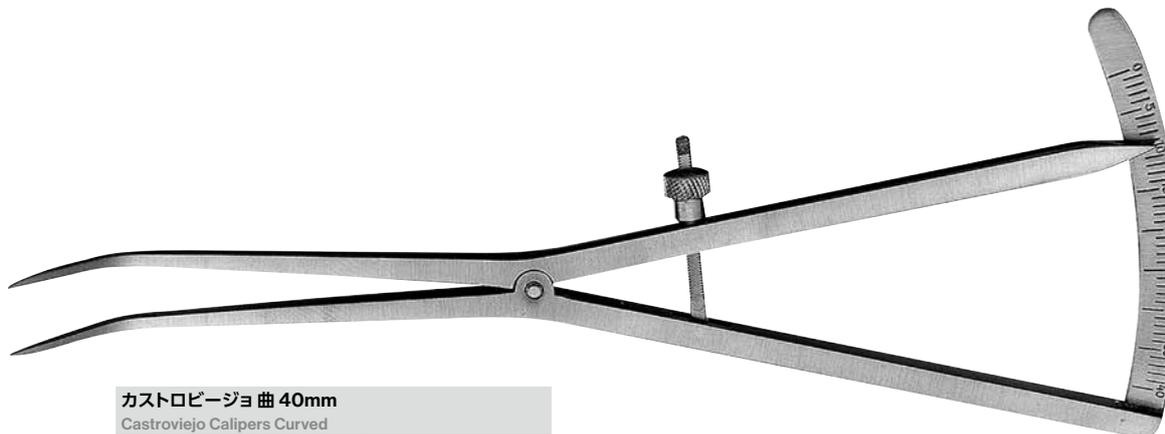

| | | |
|-----------------------------|----------|-----|
| カストロビージョ 曲 40mm | | |
| Castroviejo Calipers Curved | | |
| パートコード | 標準価格 | 取寄品 |
| CLC40C | 72,600 円 | |

全長:18cm
測定可能範囲
0 ~ 40mm

The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年7月22日現在のものです。販売機および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-120J/2407 Surgical All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.

【販売名 / 一般的名称 / 医療機器届出番号】

■ペリオドンタルチゼル / 歯科用エキスキャベーター / 13B3X10195G04102 ■ポーンチゼル / のみ / 13B3X10195G11103 ■ポーンキュレット / 歯科用キュレット / 13B3X10195G06101 ■ペリオサージカルキュレット / 歯科用キュレット / 13B3X10195G06102 ■サイナスキュレット / 歯科用キュレット / 13B3X10195G06103 ■エレベーター / 歯科用エレベーター / 13B3X10195G03101 ■ルクセーティングエレベーター / 歯科用エレベーター / 13B3X10195G03103 ■ルクセーティングハイブリッド / 歯科用エレベーター / 13B3X10195G03104 ■ポーンファイル / やすり / 13B3X10195G24102 ■ペリオドンタルファイル / やすり / 13B3X10195G24101 ■抜歯鉗子 / 抜歯用鉗子 / 13B3X10195G08101 ■ポーンブラガー / 歯科用インプラント手術器具 / 13B3X10195G09108 ■ポーングラフスコープ / 歯科用インプラント手術器具 / 13B3X10195G09104 ■ポーンスコープ / 歯科用インプラント手術器具 / 13B3X10195G09106 ■メソフランクリンレーザー / 歯科用インプラント手術器具 / 13B3X10195G09109 ■ポーンリッパカー / 歯科用インプラント手術器具 / 13B3X10195G09107 ■カーゼリッパカー / 歯科用圧入装置器具 / 13B3X10195G3110 ■止血鉗子 / 鉗子 / 13B3X10195G43103 ■サイナスリフトインスツルメント / 歯科用インプラント手術器具 / 13B3X10195G09102 ■カテーコードプローブ / 歯周ポケットプローブ / 13B3X10195G07101 ■トンスリングナイフ / 歯肉切除メス / 13B3X10195G15101 ■ペリオドンタルナイフ / 歯肉切除メス / 13B3X10195G15102 ■マウスキヤップ / 歯科用開口器 / 13B3X10195G30103 ■マウスプロップ / 歯科用開口器 / 13B3X10195G30104 ■持針器 / 持針器 / 13B3X10195G16101 ■マレット / つち / 13B3X10195G46101 ■オステオーム / 歯科用インプラント手術器具 / 13B3X10195G09101 ■ペリオスチール / 歯科用起子及び剥離子 / 13B3X10195G13101 ■ペリオトーム / 靱帯切開刀 / 13B3X10195G36101 ■チークリトラクター / 歯科用開口器 / 13B3X10195G30102 ■サイナスリトラクター / 歯科用開口器 / 13B3X10195G23101 ■サージカルリトラクター / 歯科用開口器 / 13B3X10195G30101 ■骨鉗子 / 手術用骨鉗子 / 13B3X10195G28102 ■ルートチップエレベーター / 歯科用エレベーター / 13B3X10195G03102 ■スカルペルハンドル / ナイフハンドル / 13B3X10195G32101 ■ブレードハンドル / ナイフハンドル / 13B3X10195G32102 ■はさみ / 歯肉用 / 歯科用歯肉はさみ / 13B3X10195G19101 ■はさみ / はさみ / 13B3X10195G41101 ■はさみ / 金冠用 / 歯科用金冠はさみ / 13B3X10195G44101 ■ティッシュユプライヤー / 歯科治療用ピンセット / 13B3X10195G20101 ■縫合用プライヤー / 歯科治療用ピンセット / 13B3X10195G20102 ■ポーンディッシュユプライヤー / 手術用骨鉗子 / 13B3X10195G28101 ■タオルクランプ / 鉗子 / 13B3X10195G43101 ■アスピレーター / 再使用可能な歯科用吸引カニューレ / 13B3X10195G26101 ■アスピレーター / 歯科麻酔用注射筒 / 13B3X10195G47101 ■ポーングラフシリンドリッド / 歯科用インプラント手術器具 / 13B3X10195G09103 ■ポーンキャリパス / 整形外科用カリパス / 13B3X10195G45101

●医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice