

Mouth Gags

マウスギャグ (開口器)


Instrumentation and
Procedural Products



一人でも容易に着脱可能!

アシスタントさんがつかない時や訪問診療時など、
一人で処置しなければならない時、容易に開閉・
ロック解除ができる形状! スタッフ不足でも安心!

しっかり・安定のホールド!

噛む部分が広く**しっかりホールド**できるため、
顎に**不随意運動がある患者さん**などに特に有効!
柄に適度な長さがあるため、一度開口すれば安定した
開口状態をキープ!

「落ちない」「取れない」「壊れにくい」

作業部に**しっかりと装着されたシリコン製チップ**は、口腔内で
落下してしまったり、着脱時に取れてしまう可能性が低く、
患者さんが強い力で噛んでも壊れにくい頑丈設計

Mouth Gags マウスギャグ (開口器)

なかなか開口しない患者さんの
口元から遠い場所で操作可能

口腔外部分のアーチが頬に
ぴったりフィットするため
開口器が安定

シリコンチップが作業部にしっかりと
ついているため、患者さんの事故や
スタッフの事故の発生を抑制

長めの柄のため、患者さんが
自分で外しにくく、しっかり
開口を保持

容易に開閉でき、しっかり
開口を維持するロック

先端部が湾曲しているため、
口腔内で作業野の邪魔に
なりにくい

把持方法

ペアンやはさみと
同じ方法で把持



装着方法



指で少し開口させ空いた隙間に
作業部を挿入



そのまま5-6番あたりまでスライ
ドさせ、ロック部と頬がついた
状態で指を閉じるようにしながら
開口



開口したら、しっかりロックされて
いるので開口が安定している状態

マウスギャグの装着方法は
こちらからご覧いただけます



サイズ比較



① 幼児用*

② 小人用*

③ 大人用*

	パートコード	商品名	標準価格 (税別)
①	MGI	マウスギャグ モルト 幼児用*	39,600円
	PTRTI	マウスギャグ 交換用チップ 幼児用*	1,400円
②	MGC	マウスギャグ モルト 小人用*	39,600円
	PTRTC	マウスギャグ 交換用チップ 小人用*	1,400円
③	MGA	マウスギャグ モルト 大人用	39,600円
	PTRTA	マウスギャグ 交換用チップ 大人用	1,400円

*欧米サイズのため、日本の一般の方向けには小人用、お子様向けには幼児用がおすすめです。
*交換用チップは2個(1ペア)入です。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年9月1日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の
幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあり
ます。販売名:マウスギャグ(一般的名称:歯科用開口器)医療機器届出番号:13B3X10195G30103●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)

【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy

©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-442/J/2309

Instagram



LINE



ヒューフレディグループ
オフィシャルSNSでは
様々な情報を発信しております

HuFriedyGroup
The Best In Practice