

Gracey Curette 15/16

グレイシーキュレット 15/16 (旧名称: Fit11/12)

グレイシーキュレット 15/16 (旧名称: FIT11/12) とは…
水平位診療に合わせて設計された
グレイシーキュレット11/12の改良型です。

従来のグレイシーキュレット11/12を使用する
臼歯部近心面でより優れた操作性を発揮します。

近心隅角部に特に良くフィット

15/16は臼歯部近心の処置において第一シャンクと歯面の平行性を保ちやすくフィット感が向上しました。

手指の疲労・負担の軽減

正しいポジショニングで操作できることで、手指の疲労を軽減、操作性を向上します。

様々なオプション

シャンク・ブレードの形状はオリジナル、アフターファイブ、ミニファイブがあり
シャンクの硬さはスタンダードとリジッドがあります。



11/12

11/12では、近心面に平行になるように第一シャンクを固定することが困難な場合があります。



15/16

シャンクの角度を大きく取ったことにより、臼歯部でのポジショニングがしやすくなり、スケーリング時の固定点も近くに取れます。

15/16 シャンク・ブレードの形状



オリジナル

アフターファイブ

ミニファイブ

グレイシーキュレット
オリジナル スタンダード
15/16

SG15/16XE2
¥6,600

グレイシーキュレット 15/16 早見表 *エバーエッジ2.0作業部が付与された3種のハンドルの早見表です。

| 商品名 | ハンドルの種類 シャンクの硬さ | ハーモニー (#XE2) | | エバーエッジ (#9E2) | | レジン8カラー (#C8E2) | |
|-------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | 各 ¥6,600 (税別) | | 各 ¥6,200 (税別) | | 臼歯部近心面用ハンドル色(オレンジ) 各 ¥6,000 (税別) | |
| | | スタンダード | リジッド | スタンダード | リジッド | スタンダード | リジッド |
| 15/16 | オリジナル | SG15/16XE2 | SG15/16RXE2 | SG15/169E2 | SG15/16R9E2 | SG15/16C8E2 | SG15/16RC8E2 |
| | アフターファイブ | SRPG15/16XE2 | SRP15/16RXE2 | SRPG15/169E2 | SRP15/16R9E2 | SRP15/16C8E2 | SRP15/16RC8E2 |
| | ミニファイブ | SAS15/16XE2 | SAS15/16RXE2 | SAS15/169E2 | SAS15/16R9E2 | SAS15/16C8E2 | SAS15/16RC8E2 |

Gracey Curette 17/18

グレイシーキュレット 17/18 (旧名称: Fit13/14)



グレイシーキュレット 17/18 (旧名称: FIT13/14) とは…
 水平位診療に合わせて設計された
グレイシーキュレット13/14の改良型です。

従来のグレイシーキュレット13/14を使用する
臼歯部遠心面でより優れた操作性を発揮します。

到達しづらい臼歯部遠心面への適合性向上

17/18は従来の13/14に比べ第一シャンクが長く、
 深いポケットや根面にも到達しやすくなりました。

より強いシャンクの屈曲

シャンクの角度を強くしているため、歯冠に干渉されることなく第一シャンクを
 歯軸に平行にすることができます。

手指の疲労・負担の軽減

正しいポジショニングで操作できることで、手指の疲労を軽減、操作性を向上します。



13/14

臼歯部の遠心面への到達が、患者様の開口度によって制限されてしまいます。



17/18

複屈曲になっており、ハンドルを水平に近い角度で持つことができ、開口度の少ない患者様でも、到達しにくい場所に届きやすくなります。

17/18

シャンク・ブレードの形状

※オリジナル17/18の第一シャンクは、通常の13/14より長く長くなっているため、アフターファイブの17/18はご用意しておりません。



オリジナル

ミニファイブ

グレイシーキュレット
 オリジナル スタンダード
17/18

SG17/18XE2
 ¥6,600

グレイシーキュレット 17/18 早見表 ※エパーエッジ2.0作業部が付与された3種のハンドルの早見表です。

| 商品名 | ハンドルの種類 シャンクの硬さ | ハーモニー (#XE2) | | エパーエッジ (#9E2) | | レジン8カラー (#C8E2) | |
|------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| | | 各 ¥6,600 (税別) | | 各 ¥6,200 (税別) | | 臼歯部遠心面用ハンドル色(ブルー) 各 ¥6,000 (税別) | |
| | | スタンダード | リジッド | スタンダード | リジッド | スタンダード | リジッド |
| 1718 | オリジナル | SG17/18XE2 | SG17/18RXE2 | SG17/189E2 | SG17/18R9E2 | SG17/18C8E2 | SG17/18RC8E2 |
| | ミニファイブ | SAS17/18XE2 | — | — | — | — | — |

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年10月1日現在のものです。
 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値となります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。■販売名/一般的名称/医療機器届出番号 ■グレイシーキュレット/歯周用キュレット/3B3X10195G01101
 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)【高標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標ですHu-Friedy
 ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-087J/2410

HuFriedyGroup
 The Best In Practice