

# Nevi™ Sickle Scalers

## シックルスケーラー Nevi™ (ネビィ)



40年以上のキャリアを持つベテラン職人と口腔解剖学を熟知した臨床家達の手によって共同開発されたシックルスケーラーシリーズ

—ヒューフレディ社製 シックルスケーラー-NEVI™ (ネビィ)

### 作る人と使う人の共同開発

お客さまからのフィードバックとヒューフレディ社に長年伝わる品質・開発力・技術力を駆使して開発されました。

### ユニークなアングルと特徴的なシャंकデザイン

4種の特徴的なシャंकデザインは快適な使い心地で、手指の疲労を軽減し操作性を向上します。



## スケーラー ネビィ 1 前歯用

おすすめ!



スプーン型ブレード

コンパクトな鎌型とスプーン型の2種のブレードで前歯のステインや歯石を効率よく除去

**SCNEVI19E2**


¥6,200




喫煙される患者さんや色素が沈着しやすい方等に最適のスケーラーです! 医院に1本は必需品です。

舌側中央部にも当てやすくなっています。

### 【NEVI1スプーン型ブレードのお手軽シャープニング方法】

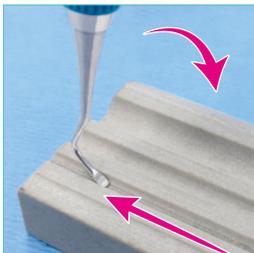

ペイツトーンで、溝に合わせて、ブルストロークでシャープニングします。  
〈コツ〉  
引き終わる時に、45度前方に倒し、先端部分をシャープにします。

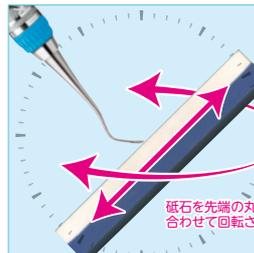

砥石を先端の丸い輪郭に合わせて回転させる

ハンドシャープニングの場合は、グレーシーやユニバーサルの先端を研ぐ方法と同じく、先端を3時(右側)に向けて、砥石を1時~2時の位置(45°)に合わせて、丸みに合わせて砥石を回しながらストロークを行います。

# Nevi™ Sickle Scalars シックルスケーラー Nevi™ (ネビィ)

## スケーラー ネビィ 2 臼歯用



大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しができやすい最後臼歯遠心面や歯間部へのアクセスが容易。

**SCNEVI29E2**

¥6,200

## スケーラー ネビィ 3 臼歯用



おすすめ!



日本人の歯牙に合わせたコンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に適用。緩やかな屈曲がついているので、特に臼歯部のスケーリング向き。

**SCNEVI39E2**

¥6,200

## スケーラー ネビィ 4 臼歯用



NEVIシリーズで最大サイズ目つりジッドタイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態に沿わせながら、遠心面・近心面へ到達。最後臼歯遠心面の強固な歯石除去にも適用。

**SCNEVI49E2**

¥6,200

### シックルスケーラー ネビィ 早見表 ※エバーエッジ2.0作業部が付与された3種のハンドルの早見表です。

商品名	ハンドルの種類	ハーモニー (#XE2)	エバーエッジ (#9E2)	レジン8カラー (#C8E2)
		 各 ¥6,600 (税別)	 各 ¥6,200 (税別)	 前歯用ハンドル色(リバーブル) 臼歯用ハンドル色(レッド) 各 ¥6,000 (税別)
ネビィ	1 前歯用	SCNEVI1XE2	SCNEVI19E2	SCNEVI1C8E2
	2 臼歯用	SCNEVI2XE2	SCNEVI29E2	SCNEVI2C8E2
	3 臼歯用	SCNEVI3XE2	SCNEVI39E2	SCNEVI3C8E2
	4 臼歯用	SCNEVI4XE2	SCNEVI49E2	SCNEVI4C8E2

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年10月1日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。■販売名/一般的名称/医療機器届出番号 ■スケーラー/歯科用スケーラー/13B3X10195G02101 ●医療機器の分類-一般医療機器(クラスI) 【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標ですHu-Friedy, Nevi ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-087J/2410

**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice